

Wichtige Sicherheitsinformation über Umsetzungshilfsmittel



Sichtprüfung

Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist.



Mechanische Belastung

Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten.



Stabilitäts test

Die Platten und Rutschbretter vorsichtig biegen und prüfen, dass ob sie steif und fest sind.



Reibungstest

Gleitseite: Geringe Reibung – ist die Oberfläche glatt und gleitet sie ebenso leicht wie im Neuzustand? Haftseite: Hohe Reibung – ist die Oberfläche rau und bremst sie wie im Neuzustand? Vergleichen Sie am besten mit einem neuen Produkt!

FUNKTIONSTEST!

Auch Umsetzungshilfsmittel altern. Führen Sie regelmäßig Funktions- und Sicherheits test durch! Falls ein Hilfsmittel die gestellten Anforderungen nicht erfüllt, ist es unverzüglich außer Gebrauch zu nehmen.

Hilfsmittel mit Griffen und Bändern



Prüfen Sie die Sicherheit!



Hilfsmittel mit Schließschnallen




Prüfen Sie die Sicherheit!



Hilfsmittel mit Versteifung




Prüfen Sie die Sicherheit!

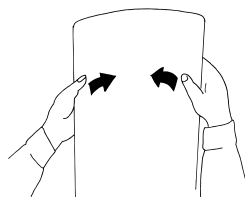

Hilfsmittel mit geringer oder hoher Reibung



Prüfen Sie die Sicherheit!

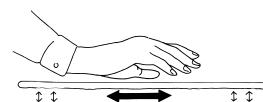

Die neueste Version der Gebrauchsanleitung finden steht unserer Homepage www.romedic.com zum Download bereit.