

Att använda SystemRoMedics produkter skall kännas bra från början till slut.

Kvalitets- och miljöcertifiering



RoMedic är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

RoMedic arbetar kontinuerligt och aktivt med att säkra och utveckla kvalitets- och miljötänkandet inom företaget.



RoMedic strävar efter att alla textila produkter i SystemRoMedic skall vara Öko-tex certifierade, vilket säkerställer att de inte innehåller hälsofarliga ämnen i skadliga koncentrationer.

Produkternas kvalitet



SystemRoMedics hjälpmedel är av högsta kvalitet och uppfyller de krav som ställs på denna typ av hjälpmedel för vård och omsorg. Alla hjälpmedel i SystemRoMedic är CE-märkta och många är patentskyddade.

Alla produkter i SystemRoMedic uppfyller kraven enligt Medicintekniska direktivet MDD 93/42/EEC, klass I produkter.



TÜV, som är ett oberoende testinstitut, har testat många av våra mobila och stationära lyftar i SystemRoMedic.

Unika funktioner och material



Våra glidmattor i SystemRoMedic är tillverkade av vårt eget unika glidmaterial ULF, Ultra Low Friction, och är därför mycket lätta och effektiva att använda.

Skötselråd

Läs instruktionerna på respektive produkts märkning. Våra produkter utvecklas och förbättras hela tiden, varför vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkterna utan föregående information.

Textila produkter

Alla våra manuella hjälpmedel i textil kan tvättas i 70 graders vattentvätt och torkas i torktumlare med låg temperatur. Låg temperatur för torktumling innebär 45-50 graders värme. Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.



Undantag:

WendyLett, WendyLean, TopSheet och IncoSheet kan tvättas och torkas i högre temperatur. Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.



Lyftselar

Läs tvättråd på lyftselens märklapp.



Undantag:

Våra lyftselar i engångsmaterial skall inte tvättas alls.

Plastprodukter

Ytan på produkten kan rengöras med vatten/tvållösning alternativt med desinfektionsmedel 70 % etanol eller 45 % isopropanol.

Mobila och stationära lyftar

Vid behov, rengör lyften med varmt vatten eller tvättsprit och se till att hjulen är fria från smuts och hår. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor, detta kan skada aluminiumet och plastmaterialen.

Desinficering:

Vid behov av desinficering kan följande medel användas: 70 % etanol eller 45 % isopropanol.