

ComfortCushion ist ein kompaktes Kissen aus rutschfestem Material, das unter den Knien des Benutzers positioniert wird, um ein Nachuntengleiten zu verhindern. Zugleich wird einer Stretchlage der Hinterseite der Oberschenkel entgegengewirkt, die bei gerade liegenden Beinen auftreten kann. ComfortCushion besteht aus einem Material mit geschlossenen Poren und besitzt somit gute hygienische Eigenschaften.

ComfortCushion ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung



Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:  
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

## Positionierung von ComfortCushion

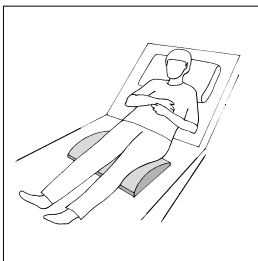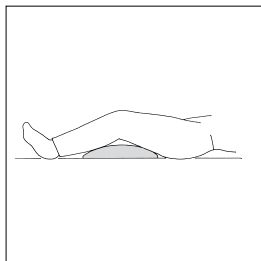

Legen Sie das Kissen unter die Kniekehlen des im Bett sitzenden Patienten, um beim Erhöhen des Kopfteils ein Nachuntersinken zu verhindern.

Achten Sie beim Erhöhen des Kopfteils darauf, dass der Druck gegen die Schulterpartie verringert wird, indem Sie den Patienten nach vorn neigen oder ein reibungsminderndes Hilfsmittel hinter den Schultern einsetzen.

**ACHTUNG!** Denken Sie an die Gefahr von Kontrakturen; lassen Sie das Kissen nicht zu lange unter den Knien liegen.

### Material:

Polyethylen

### Pflegeanleitung:

Reinigung mit Spülmittel- oder Desinfektionslösung. Mit einem Lappen trocken wischen.

Bitte beachten: Das Produkt nicht zu hohem Druck oder Gegenständen mit scharfen Kanten aussetzen. Punktbelastung kann Abdrücke im Material hinterlassen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group