


50 x 60 cm



25 x 60 cm

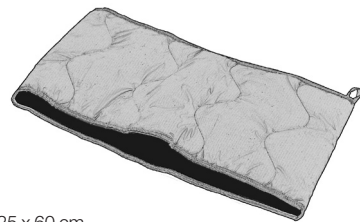

Max: 180 kg/397 lbs

EasySlide wird zum Wenden des Patienten im Bett sowie zum Umsetzen zwischen Bett und Rollstuhl/Toilette und zum Höhersetzen im Bett verwendet. EasySlide ist eine zylinderförmige, gepolsterte Matte mit leicht gleitender Oberflächenschicht an der Innenseite.

EasySlide ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. EasySlide ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. EasySlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.

Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung


Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.



Testen der Gleitfunktion

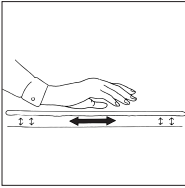

Testen Sie die „reibunglose“ Funktion von EasySlide durch Hin- und Herschieben. Beachten Sie dabei die Gleitfähigkeit. Vergleichen Sie ggf. mit einer neuen EasySlide-Matte.

Positionieren von EasySlide

EasySlide unter das halbe Gesäß bzw. Schulter schieben. Beim Umsetzen das gesamte Körpergewicht auf die Gleitmatte verlagern.

Zum Entfernen am unteren Ende der Gleitmatte ziehen.

Anwendung von EasySlide



1

1. EasySlide eignet sich ausgezeichnet zum Umsetzen zum und vom Rollstuhl. Ergänzung durch EasyGlide bietet sich an.




2

2. EasySlide kann zum Höhersetzen im Bett als reibungsminderndes Hilfsmittel unter die Schultern geschoben werden.



3

3. Zum seitlichen Umsetzen wird EasySlide unter die Hüften geschoben. EasySlide kann von aktiven Patienten selbst benutzt werden sowie von Pflegepersonen bei weniger aktiven Patienten.

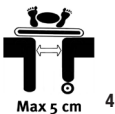

4

4. Beim Umsetzen zwischen Bett/Liege und Duschwagen darf der Abstand nicht größer sein als 5 cm.

ACHTUNG!

Stets die Räder feststellen.



5

5. EasySlide nie unter dem Patienten zurücklassen oder zu nahe der Bettkante anbringen, so dass sie auf den Fußboden rutschen.

Material:

Polyester, Mikrofasern, Polyamid

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Technische Daten

Größe:	Gewicht	max. zul. Belastung
2010 50 x 60	0,35 kg	180 kg
2015 25 x 60	0,20 kg	180 kg
2020 50 x 60 (Mikrofasern)	0,35 kg	180 kg

Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese da diese das Material beschädigen können

Wiedereinsatz:

EasySlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

Im Falle des Wiedereinsatzes muss EasySlide gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Modelle	Größe	Überzug	Einweg-Überzug	Kombination
2010	50 x 60	2051	2055	2030 = 2020 + 2051
2015	25 x 60			
2020	50 x 60 (microfiber)			

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group