



Max: 150 kg/330 lbs

MiniStretcher kommt beim Heben und Umsetzen in der Notaufnahme oder innerhalb der Ambulanztätigkeit zum Einsatz. Umsetzung zwischen zwei Einheiten, z.B. vom Bett zur Bahre oder beim Anheben vom Fußboden. MiniStretcher ist leicht zu reinigen und zu verstauen.

MiniStretcher ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verbleichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.





Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.





Mechanische Belastung

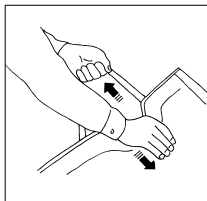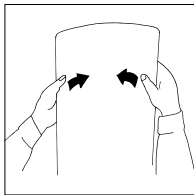

Prüfen Sie die Festigkeit von MiniStretcher durch vorsichtiges Biegen der Platte. Die Platte muss elastisch und fest sein. Bei geringer Festigkeit ist MiniStretcher zu entsorgen.

Ziehen Sie an den Griffen und prüfen Sie, ob sie der entsprechenden Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Hilfsmittel zu verwerfen.

Anbringen und Anwendung von MiniStretcher

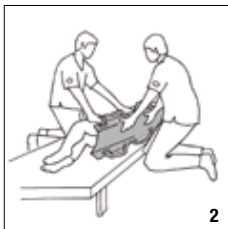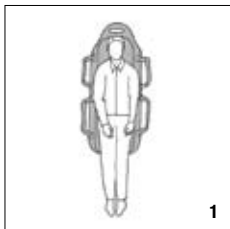

1. Den Patienten zentriert auf dem MiniStretcher positionieren und darauf achten, dass der Kopf gute Stütze bekommt.

2. Den Patienten zur Seite drehen und Griffe unter den MiniStretcher einstecken, bevor dieser unter den Patienten eingeschoben wird.



3, 4. Arbeiten Sie zu zweit oder mehreren an beiden Seiten oder vorn und hinten. Planen Sie die Umsetzung so, dass sie so kurz wie möglich wird.

Aufbewahrung und Reinigung von MiniStretcher



Den MiniStretcher wie abgebildet auf der Krankenwagenbahre aufbewahren.

Den MiniStretcher mit Hochdruckreiniger und Oberflächendesinfektion reinigen.

Material:

Polyester

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group