




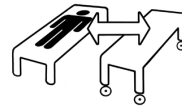


RollerSlide

SystemRoMedic

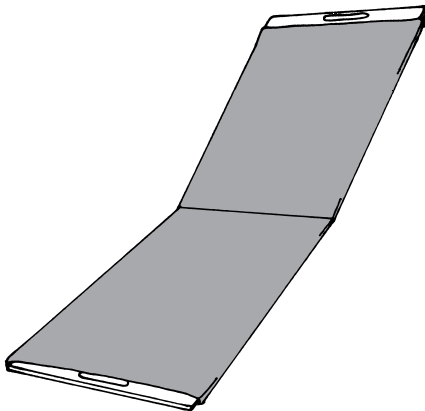

 <p>MAX 150 kg</p>	 <p>MAX 135 kg</p>
<p>MAX 20 cm</p> 	<p>MAX 15 cm</p> 
<p>Art. no.</p> <p>9145 9148</p> <p>9155 9158</p>	<p>Art. no.</p> <p>9120</p> <p>9110</p>

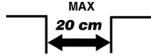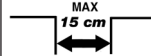RollerSlide kommt in erster Linie beim Umsetzen im Liegen zwischen Bett und Röntgentisch/Operationstisch/Duschwagen zur Anwendung. RollerSlide ist in drei Ausführungen erhältlich (RollerSlide, RollerSlide Flexi und RollerSlide Light) sowie in zwei Größen, einer kürzeren Version für den halben Körper und einer längeren für den ganzen Körper. Die längere Ausführung kann für einfacheren Transport sowie zum Umsetzen in halbsitzender Stellung in der Mitte zusammengelegt werden.

RollerSlide ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. RollerSlide ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. RollerSlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblüht ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:


Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.




Kontrolle der Funktion

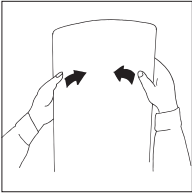



Prüfen Sie die Festigkeit von RollerSlide durch vorsichtiges Biegen der Platte. Die Platte muss elastisch und fest sein. Bei nachlassender Festigkeit ist RollerSlide zu entsorgen.

Positionieren/Entfernen von RollerSlide

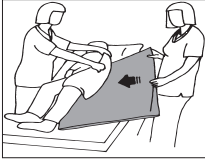

Drehen Sie den Patienten ggf. unter Zuhilfenahme des Lakens in Seitenlage und schieben Sie RollerSlide ca. 1/3 unter den Körper. Zum Entfernen den Patienten zur Seite beugen und RollerSlide herausziehen.

Anwendung von RollerSlide

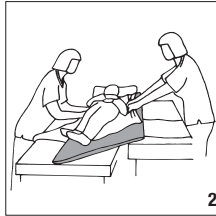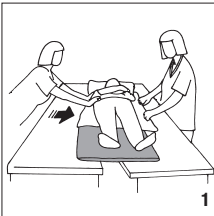

Arbeiten Sie von beiden Seiten aus und nehmen Sie beim Schieben und Ziehen Schrittstellung ein (1). Der Abstand zwischen den Liegeflächen darf nicht größer sein als 20 cm. EasyGlide bietet sich auch bei geringfügigen Höhenunterschieden zwischen den Liegeflächen als Hilfsmittel an (2).

RollerSlide ist beim Röntgen zu entfernen, während RollerSlide Light während des Röntgens unter dem Patienten liegen bleiben kann.

Material:

Polyamid, polyether

Wiedereinsatz:

Roller Slide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

Im Falle des Wiedereinsatzes muss RollerSlide gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

Technische Daten:

Art.nr	Größe	Modell	Gewicht	Höchstgewicht	Sliding cover	Disposable cover
9120	175 x 50	Light	3,5 kg	135 kg	9136	9138
9110	85 x 50	Light	1,5 kg	135 kg	9156	9168
9145	175 x 50		4,0 kg	150 kg	9136	9138
9155	85 x 50		2,0 kg	150 kg	9156	9168
9148	175 x 50	Flexi	4,0 kg	150 kg	9136	9138
9158	85 x 50	Flexi	1,85 kg	150 kg	9156	9168

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese da diese das Material beschädigen können.

Reinigung:

Bei Bedarf ist RollerSlide mit warmem Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Phenol, Chlor oder Lösungsmittel enthalten, da diese das Material beschädigen können. Der Gleitbezug kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage www.romedic.com zum Download bereit.

RoMedic AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

SWEDEN

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group