


SitWalk

SystemRoMedic

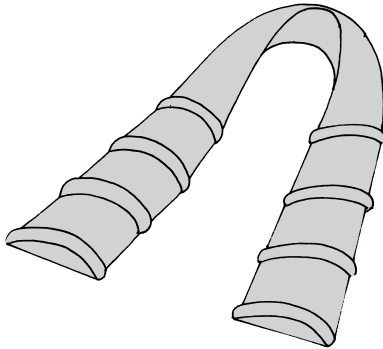

SitWalk wird zum Zurücksetzen im Stuhl/Rollstuhl verwendet, wenn der Patient nach vorn gerutscht ist. Das Hilfsmittel ist mit mehreren Griffen versehen, um bequeme Arbeitsstellungen zu ermöglichen.

SitWalk ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. SitWalk ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. SitWalk ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.





Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:

Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.




Kontrolle der Funktion

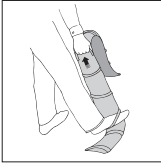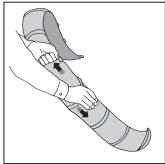

Ziehen Sie an den Griffen und prüfen Sie, ob sie der entsprechenden Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Hilfsmittel zu verwerfen.

Positionieren und Entfernen von SitWalk

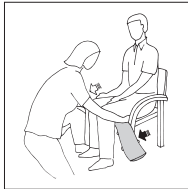


SitWalk mit den Griffen vom Körper abgewandt nahe dem Gesäß unter den Oberschenkeln durchschieben. Durch Hin- und Herziehen an den Griffen das Band langsam zum Gesäß hochschieben.

Unterstützen Sie die Füße, um die Oberschenkel zu entlasten.

SitWalk durch Hin- und Herziehen an den Griffen das Band nach unten bewegen bis es sich leicht unter den Oberschenkeln herausziehen lässt.

Anwendung von SitWalk

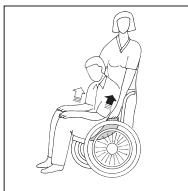

Sie können zu zweit oder allein arbeiten. Der Patient sollte aufrecht und/oder nach vorn gebeugt sitzen.

Beugen Sie den Patienten zur Seite und ziehen Sie an der anderen Seite. Beugen Sie den Patienten zur anderen Seite und ziehen Sie entsprechend an der Gegenseite. Wiederholen Sie diese Prozedur bis der Patient ganz hinten im Stuhl sitzt. Arbeiten Sie allein, sollten Sie stets die Seite wechseln, um mit gestreckten Armen und richtiger Gewichtsverlagerung arbeiten zu können.

Es empfiehlt sich, einen Fußschemel unter die Füße des Patienten zu stellen um die Oberschenkel zu entlasten. Dies verringert den Reibungswiderstand.

Material:

Polyester

Technische Daten

Größe	Gewicht	max. zul. Belastung
140 x 12 cm	0,35 kg	135 kg

CE-Konformität:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese das Material beschädigen können.

Wiedereinsatz:

SitWalk ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Im Falle des Wiedereinsatzes muss SitWalk gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group