

Max: 200kg/440 lbs

TopSheet 1520 und 1510 sind zwei Ausführungen eines Inkontinenzlakens zur Stütze in Seitenlage in Verbindung mit mobilem oder stationärem Hebegerät. TopSheet besteht aus zwei Teilen, die durch ein Klettband miteinander verbunden sind und somit leicht geteilt werden können. An jeder Seite befindet sich ein Befestigungspunkt. TopSheet 1510 bedeckt das ganze Bett und ist an der Unterseite mit einem reibungsmindernden Material beschichtet, so dass das Produkt direkt auf den Matratzenbezug oder WendyLett ohne WendyLett2Way oder 4Way aufgelegt werden kann. TopSheet 1520 wird auf TurnSheet 1580, 1590 oder WendyLett4Way aufgelegt, um beim Wenden den Reibungswiderstand zu verringern.

TopSheet ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung


Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:

Verweilen Sie während des Positionierungsmoments beim Anwender.


Vergewissern Sie sich, dass Aufhängeschlingen korrekt am Hebebügel angebracht sind.

Prüfen Sie die korrekte Befestigung des Hebebügels sowie die Funktion der Aushaksicherung.

## Positionieren von TopSheet:

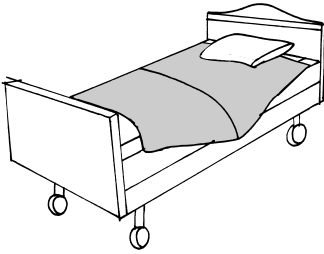

TopSheet 1520 wird auf TurnSheet 1580, 1590 oder WendyLett4Way aufgelegt, um beim Wenden den Reibungswiderstand zu verringern. TopSheet 1510 ist an der Unterseite mit reibungsminderndem Material beschichtet und kann direkt auf dem Matratzenbezug oder WendyLett aufgelegt werden. Lesen das Handbuch des jeweiligen Produktes, das Sie als Unterlage gewählt haben.

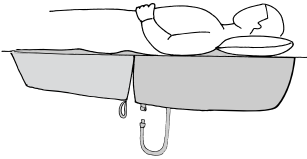


TopSheet 1520 und 1510 bestehen jeweils aus zwei Teilen Inkontinenzstoff, die mittels Klettband miteinander verbunden sind.

TopSheet 1520 ist 140cm lang und 140cm breit.


TopSheet 1510 ist 200 cm lang und 160 cm breit.

Den Patienten mit den Hüften auf dem Unterteil von TopSheet positionieren. Dies erleichtert das Herausziehen zwecks Wechsel oder Reinigung.


## Bitte beachten:

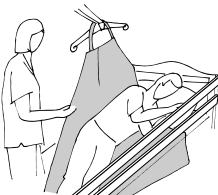

Aus Sicherheitsgründen muss an der Seite, zu der der Patient gewendet werden soll, entweder eine Sicherungsseite oder eine Hilfsperson vorhanden sein. Lassen Sie den Patienten niemals ohne Aufsicht.

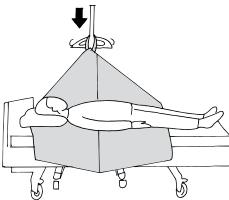


Bei Verwendung eines mobilen Hebers ist der Hebebügel senkrecht über der Hebeschlinge zu positionieren.

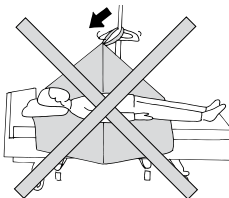

Bei schrägem Anheben besteht Kippgefahr. Sorgen Sie dafür, dass sich der Heber unter dem Bett seitlich verfahren lässt.

## Wenden des Patienten mit TopSheet:

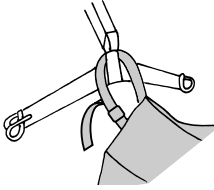

TopSheet wird über dem Hebebügel eines mobilen oder stationären Hebers angebracht.



Aus Sicherheitsgründen muss eine Sicherungsseite oder eine Hilfsperson vorhanden sein.

Den Wendevorgang durch Erhöhen des Hebebügels starten. Die Hilfsperson mit der besten Übersicht über den Patienten bedient den Heber. Den Patienten in die gewünschte Lage bringen.



Damit der Patient in der Bettmitte zu liegen kommt, kann es erforderlich sein, manuell nachzuhelfen.

## Wenden und Intimhygiene:



Wenn sich der Patient in der gewünschten Lage befindet, kann das Klettband am Rücken des Patienten gelöst werden.



Da TopSheet dem Patienten nun Rückenstütze verleiht, können die erforderlichen Hygienemaßnahmen vorgenommen werden, ohne eine Belastung der Hilfsperson zu verursachen.


## Wechseln des Unterteils von TopSheet:

Den Patienten in Seitenlage bringen (siehe Wenden des Patienten mit TopSheet). Klettband des Teils, auf dem der Patient liegt, lösen und soweit wie möglich unter den Patienten einschieben. Ein frisches Unterteil entlang der Klettbandkante befestigen und ebenfalls soweit wie möglich unter den Patienten einschieben.

Den Patienten zurück auf den Rücken legen, den Heber an der anderen Seite ansetzen und den Patienten in die andere Richtung wenden.

Das zu ersetzende Unterteil entfernen und die Klettbandkante des frischen Unterteils hervorziehen und befestigen.

## Funktionsprüfung

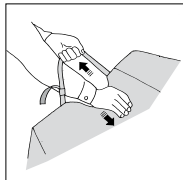

Prüfen Sie die Funktion der Schnalle durch entsprechende Belastung.

## Material:

Polyester, polyamid

## Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.

Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

## Größe:

1510 200 x 160

1520 140 x 140

## Zubehör

1509 140 x 160 (Unteren teil zu 1510)

1519 80 x 140 (Unteren teil zu 1520)

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group