



200x150
140x200



TurnSheet wird im Bett verwendet und besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, um sowohl dem Patienten als auch der Hilfsperson das Wenden im Bett oder Versetzen zum Kopfende hin zu erleichtern. TurnSheet besteht aus zwei Teilen, einem Matratzenbezug und einer Wendedecke. Der Matratzenbezug wird um die Matratze herumgelegt, die Wendedecke oben aufgelegt. Der Matratzenbezug besteht aus Gleitmaterial und Bremsfläche. 140 cm hat zwei Gleitsektionen, 200 hat drei Gleitsektionen.

TurnSheet ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. TurnSheet ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. TurnSheet ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblüht ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.



Kontrolle der Funktion

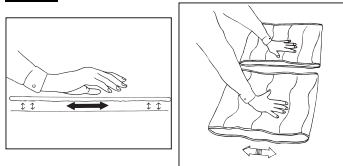


Testen Sie die Gleitfunktion von TurnSheet durch Hin- und Herschieben. Beachten Sie dabei die Gleitfähigkeit. Vergleichen Sie ggf. mit einem neuen Produkt.
Prüfen Sie das Bremsmaterial auf analoge Weise.

Zu beachten





Beachten Sie die Gefahr des Herausgleitens. Achten Sie darauf, dass die Matratze so breit ist, dass an beiden Kanten des Matratzenbezugs rutschfestes Material vorhanden ist.
Lassen Sie den Patienten nicht unbeaufsichtigt ohne aktivierte Seitensicherungen/Seitengitter im Bett.

Positionierung

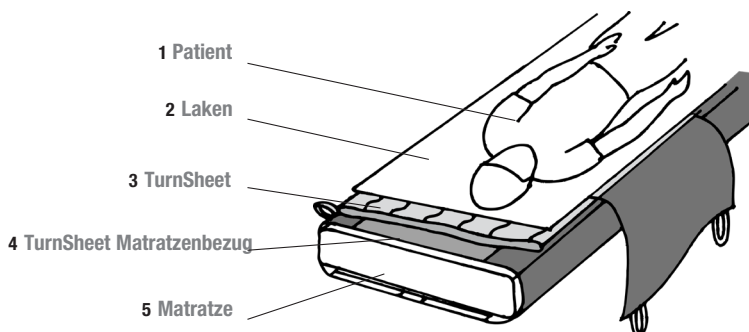



TurnSheet in vorstehender Reihenfolge im Bett platzieren. Matratzenbezug mit Klettband um die Matratze herum befestigen. Wendedecke mit den Gleitflächen zueinander auflegen.

Wenden mit TurnSheet

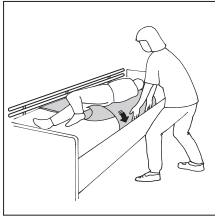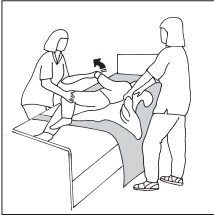



Den Patienten auf eine Seite ziehen. Laken und Wendedecke glatt streichen.
Am Laken ziehen und Patient in gewünschte Position wenden.
Das Laken an beiden Seiten unter die Matratze stecken und Seitensicherungen/Seitengitter aktivieren/anbringen.

Anwenden von Gleitsektionen

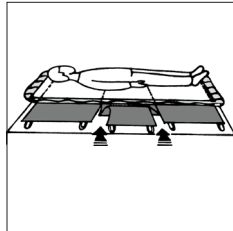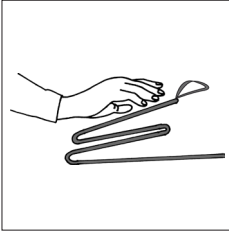

TurnSheet 140 cm hat zwei Gleitsektionen, TurnSheet 200 cm hat drei Gleitsektionen. Unter den Gleitsektionen ist Bremsmaterial vorhanden.

Die Gleitsektionen können entfernt werden, um den Patienten im Bett positionieren zu können. Z. B. kann die Gleitsektion am Gesäß entfernt werden, um Abgleiten zu verhindern, wenn sich der Patient sich im Bett aufsetzen will.

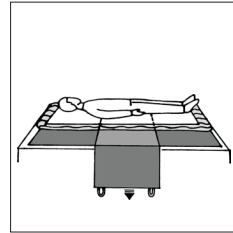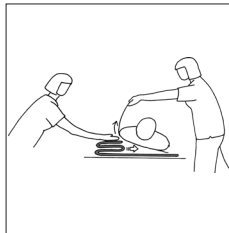

Einfaches Entfernen und Anbringen der Gleitsektionen durch Umschlagen und Einschieben bzw. Herausziehen. Dies wird erleichtert, indem eine Hilfsperson den Patienten seitlich etwas hochzieht.

Material:

Polyamid, polyester, mikrofaser

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.

Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese da diese das Material beschädigen können.

Wiedereinsatz:

TurnSheet ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

Im Falle des Wiedereinsatzes muss TurnSheet gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

CE-Konformität:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Technische Daten

	Größe	Gewicht
1580	140 x 200	2,0 kg
1590	200 x 150	2,1 kg
1583	Matratzenbezug zu 1580	0,9 kg
1593	Matratzenbezug zu 1590	1,0 kg

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group