

WendyLett ist ein Gleitlaken zur Erleichterung der Positionierung im Bett, z.B. Umdrehen. Es wird wie ein gewöhnliches Laken angebracht und lässt sich mit RoMedics Ziehlaken, WendyLett 2Way oder 4Way kombinieren. WendyLett ist in verschiedenen Größen und Modellen erhältlich.

WendyLett ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:

Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

Positionierung

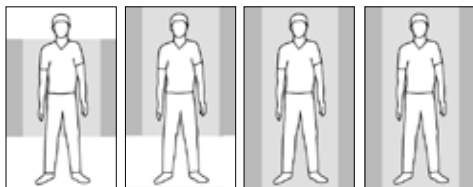

100x200


140x200

200x200

200x220

WendyLett mit der glatten Fläche in der Mitte des Bettes positionieren.

Material

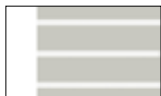

1

1. Das Gleitlaken WendyLett besteht aus grauem Material mit weißen Rändern. Die Ränder liegen in Gleitrichtung.



2


2. Das Ziehlaken WendyLett 2Way besteht aus weißem Material mit grauen Rändern. Die Ränder liegen in Zugrichtung.



3

3. Das Ziehlaken WendyLett 4Way ist grau kariert mit Gleitschicht an der Unterseite. Die Ränder liegen in Zugrichtung.

Anwendung

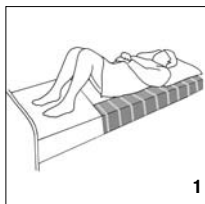

1

1. WendyLett eignet sich für Benutzer, die sich mit etwas Gleithilfe selbst umdrehen können.



2

2. Mit WendyLett2Way kann sich der Benutzer selbst umdrehen, ohne beim Erhöhen des Kopfendes nach unten zu gleiten. Falls der Benutzer beim Umdrehen etwas Hilfe benötigt oder schwergewichtig ist, eignet sich WendyLett2Way als Ziehlaken für Hilfspersonen. Mit WendyLett4Way kann dem Benutzer sowohl beim Hochschieben im Bett als auch beim Umdrehen Hilfestellung geleistet werden.

Material:

Polyester, baumwollen, satin

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des
Materials nicht im Wäschetrockner
trocknen.

Größe:

1609	100 x 200 Vit
1614	140 x 200 Vit
1629	100 x 200 Grå/vit
1634	140 x 200 Grå/vit
1639	200 x 200 Grå/vit
1669	200 x 220 Grå/vit

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group