

Max: 300kg



HygieneHBSling ist ein einfach anzulegender Hebegurt und erleichtert dem Assistenten das Aus- und Ankleiden des Anwenders in Verbindung mit Toilettenbesuchen. Aufgrund der Ausführung mit Beinteilen sitzt der Anwender nicht auf dem Gurt sondern erhält Stütze von Rücken, Hinterkopf und Beinen. HygieneHBSling ist für Hebesituationen in Verbindung mit Aus- und Ankleiden vorgesehen.

HygieneHBSling ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

Die Hebegurte und Heber von RoMedics sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Patienten. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Hebegurtes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblüht ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden:


Achten Sie auf die richtige Größe des Hebegurtes, um die Gefahr des Herausgleitens oder Gefühl von Unbehagen zu vermeiden. Ein zu großer Hebegurt kann dazu führen, dass der Anwender herausgleitet.

Verweilen Sie während des Hebemoments beim Anwender.

Bringen Sie die Rückenösen des Hebegurtes vor den Ösen an der Beinstützen an und verwenden Sie einen zugelassenen Hebebügel.

Positionierung des Hebegurtes, wenn der Anwender im Rollstuhl/Sessel oder auf dem Bett sitzt:

Dieser Hebegurt setzt gewisses Bewegungsvermögen des Anwenders voraus. Bei zu schwacher Muskelkraft des Anwenders besteht Gefahr des Herausgleitens. Vorsicht!

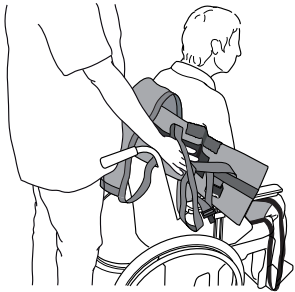


Der HygieneHBSling wird am Rücken und 5-10 cm unter die Achselhöhlen angelegt. Das Etikett ist die Mitte des Gurtes, die am Rückgrat des Anwenders entlang zu liegen kommen soll.



Die Arme in die Hebschlingen einführen. Wenn der Anwender die Möglichkeit hat, sich nach vorn zu neigen/nach vorne geneigt zu werden, bringt dies eine Erleichterung mit sich. Schnalle schließen – ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Befestigung korrekt ist. Ziehen Sie am Band, um den Gurt zu spannen.




Positionieren Sie die Beistützen unter den Oberschenkeln des Anwenders.

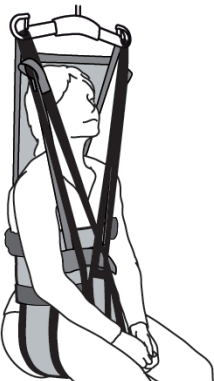


Legen Sie die Beinstützen über Kreuz, befestigen Sie die Ösen des Rückenteils vor denen der Beinstützen.

Den Hehebügel langsam hochfahren und prüfen, ob alle Teile korrekt sitzen, bevor Sie den Anwender von der Unterlage abheben.

Entfernen des Hebegurtes, wenn der Anwender sitzt:

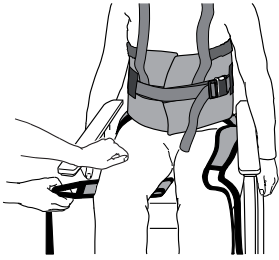


Die Beinstütze nach unten stülpen und an der Außenseite des Oberschenkels herausziehen.

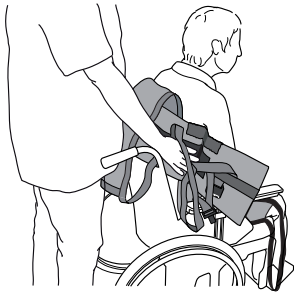


Den Hebegurt hinter dem Rücken des Anwenders hochziehen.

Nach dem Toilettenbesuch:

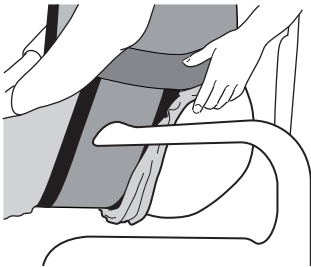

Die Hosenbeine soweit wie möglich nach oben schieben. Beinstütze zwischen Kniekehle und Hosenbund anbringen.

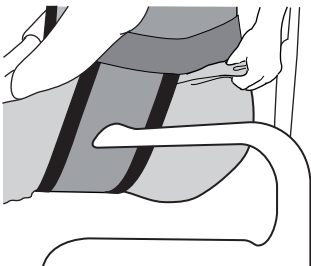

Den Anwender hochheben und Hosen hochziehen. Nicht höher als notwendig anheben.

Material:
Polyester: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Größen

Hebegurte können oft sowohl bei 2- als auch 4-Punktaufhängung verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Breite des Hebebügels der Größe des Hebegurtes und den Voraussetzungen des Anwenders entspricht.

Aus Sicherheits- und Hygienegründen empfiehlt sich die Verwendung von persönlich angepassten Hebegurten.

Storleksinformation

Größe	XXS/Grau	XS/Orange	S/Rot	M/Gelb	L/Grün	XL/Lila	XXL/Weiß
Maße der Weste in cm	60	70	80	95	110	122	142
Empf. Anwendergewicht kg	10-30	25-45	40-60	55-80	75-110	90-130	120-170

Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets die neueste Version des Handbuchs besitzen. Sie steht auf unserer Homepage www.romedic.com zum Download bereit.