

Scale700 ist eine Personenwaage zur Befestigung an Personenhebern. Die Montage erfolgt oberhalb des Hebebügels. Somit lässt sich auf einfache Weise das Gewicht des Anwenders während des Hebens ermitteln. Die Waage kann sowohl bei mobilen als auch stationären Hebern verwendet werden. Die Messwerte werden auf einem Display mit großen, deutlichen Ziffern angegeben. Scale700 ist auf Gewichte von 4 kg bis 300 kg ausgelegt.

Scale700 ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten und Hebezubehör. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

CE Max: 300kg

Die Hebegurte und Heber von RoMedics sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Patienten. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.

Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung
Unterziehen Sie das Produkt regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung


Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Verweilen Sie während des Hebemoments beim Anwender.
Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Aufhängeschlingen am Hebebügel angebracht sind.
Prüfen Sie die korrekte Befestigung der Waage sowie die Funktion der Aushaksicherung.

Montage von Scale700 an mobilen oder stationären Hebern.


Zunächst den Adapter am Hebeband oder Hebearm befestigen. Anschließend Scale700 mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels und Universalschraubenschlüssels am Adapter montieren.

Achten Sie darauf, dass alle Muttern fest angezogen sind.

Der Heber ist nun zum Versetzen des Anwenders bereit.

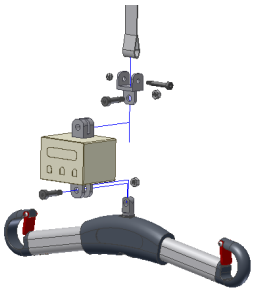

Wiegen mit Scale700:

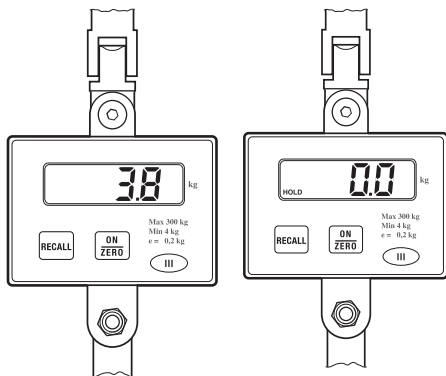


Hängen Sie den leeren Hebegurt, der zum Wiegen vorgesehen ist, an den Hehebügel.
Drücken Sie auf die Starttaste (on/zero). Die Waage zeigt das Gesamtgewicht von Hehebügel und Hebegurt an. Anschließend geht die Anzeige auf Null zurück und zeigt in der unteren linken Ecke „0.0“ und „hold“ an. Die Waage ist nun zusammen mit Hehebügel und Hebegurt auf Null gestellt.

Wiegen des Anwenders:

Legen Sie dem Anwender den Hebegurt auf korrekte Weise an (lesen Sie die Gebrauchsanleitung des Hebegurtes).
Befestigen Sie die Schlingen des Hebegurtes am Hehebügel und beginnen Sie mit dem Heben. Falls sich die Waage ausgeschaltet hat, drücken Sie erneut die Starttaste (on/zero).
Wenn der Anwender angehoben und die Bewegung zur Ruhe gekommen ist, wird das Gewicht am Display angezeigt.

Nach Abschluss des Wiegevorgangs den Anwender an geeigneter Stelle absetzen.

Batteriewechsel:

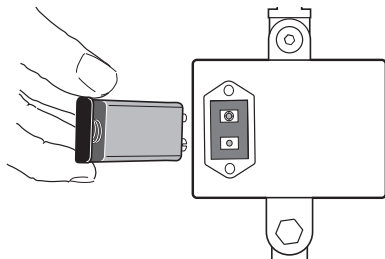

Batteriewechsel erfolgt an der Rückseite der Waage mit einer 9V-Batterie.
Die schwarze Batterieklappe anheben und den Batteriebehälter herausnehmen, die Batterie ersetzen und Behälter wieder einsetzen.

Pflegeanleitung:

Bei Bedarf Scale700 mit warmem Wasser oder Spiritus reinigen.

Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets die neueste Version des Handbuchs besitzen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com/manuals.htm> zum Download bereit.

RoMedic AB

Veddestavägen 15
SE-175 62 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33
Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com
E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]