
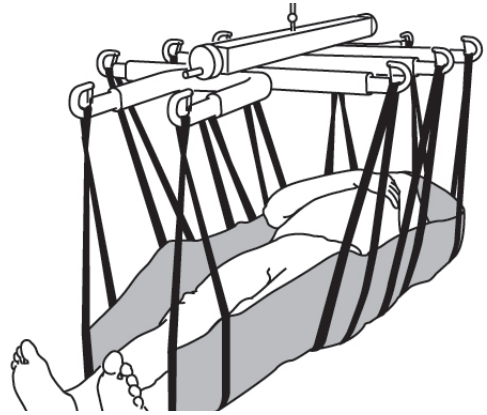


StretcherSling Handbuch

SystemRoMedic

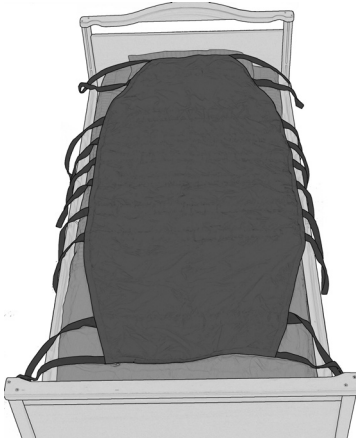

Max: 300kg

StretcherSling ist ein Hebegurt, der zusammen mit einem speziell gestalteten Hebebügel, StretcherBar, beim Anheben in horizontaler Lage verwendet wird. Er ist mit 10 Aufhängepunkten versehen, je fünf auf jeder Seite des Anwenders, um den Körper gleichmäßig zu unterstützen. StretcherSling ist zum Umsetzen von Personen in liegender Stellung vorgesehen.

StretcherSling ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Funktionen des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

Die Hebegurte und Heber von RoMedics sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Patienten. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.

Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Hebegurtes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden gilt folgendes:


Verweilen Sie während des Hebemoments beim Anwender.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Aufhängeschlingen am StretcherBar angebracht sind.

Prüfen Sie die korrekte Befestigung des Hebebügels sowie die Funktion der Aushachsicherung.


Bringen Sie anhand der Gleichgewichtseinstellung den Körper in eine balancierte Stellung.

Produktbeschreibung von StretcherSling und StretcherBar

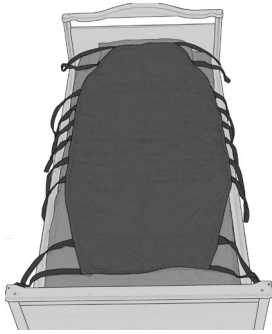


StretcherSling besteht aus einem 177 cm langen Tuch und fünf an den beiden Seiten zusammenhängenden Hebebändern. Hierdurch verteilt sich das Gewicht des Anwenders auf zehn Bänder.


StretcherSling ist auf StretcherBar zugeschnitten, und andere Kombinationen werden nicht empfohlen.

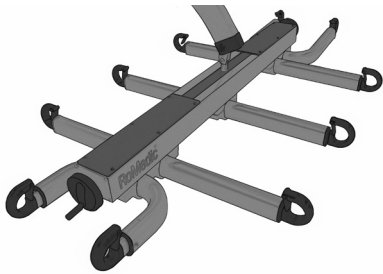

StretcherBar ist aus Aluminium gefertigt und besitzt ein Mittelteil mit eingebauter Gleichgewichtsregelung sowie fünf Aluminiumprofilen mit Haken an beiden Enden. Siehe Handbuch für StretcherBar.

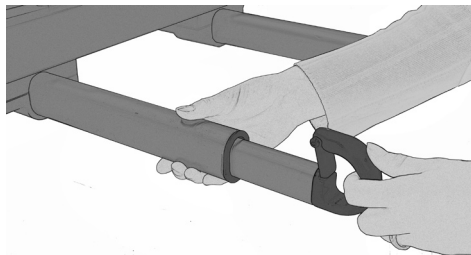

Die Hubhaken sind mit Aushaksicherung versehen, und sämtliche Hebearme lassen sich durch leichtes Herausziehen vor dem Anheben auf die Breite des Anwenders einstellen. Siehe Handbuch für StretcherBar.

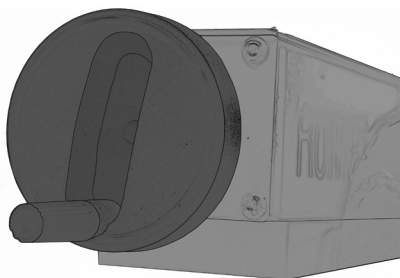

Das Mittelteil des StretcherBar ist mit eingebauter Gleichgewichtsregelung ausgestattet. Die Regelung erfolgt einfach anhand einer Kurbel an beiden Seiten. Siehe Handbuch für StretcherBar.

Anbringen und Entfernen des StretcherSling kann nur in liegender Stellung des Anwenders erfolgen:



1


1. Wenden Sie den Anwender zu sich hin. Legen Sie den StretcherSling mit dem Etikett nach unten und der Mittellinie entlang des Rückgrats des Anwenders aus. Der obere Teil des StretcherSling soll dem Kopf Stütze bieten.

Die Kante des Hebegurtes so weit wie möglich unter den Anwender schieben. Positionieren Sie die Schlingen so, dass Sie sie erreichen, nachdem sie den Anwender auf den StretcherSling zurückgedreht haben.



2


2. Rollen sie den Anwender wieder zurück auf den Hebegurt und ziehen Sie diesen auf der anderen Seite mithilfe der Aufhängebänder hervor.

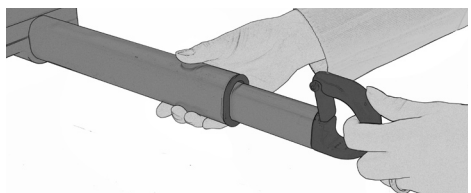

3

3. Bei Bedarf: Stellen Sie die Breite des StretcherBar durch Herausziehen der Hebehaken auf den Anwender ein.

Hängen Sie daraufhin die Hebeschlingen am Bügel ein.

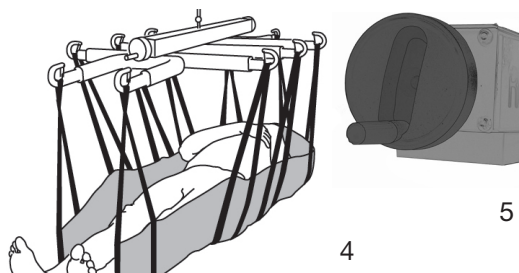

4

4. Heben Sie den Heber an bis sämtliche Aufhängeschlingen gestreckt sind. Bevor Sie denn am Heber von der Unterlage abheben, überprüfen Sie noch einmal die gesamte Ausrüstung.

5


5. Falls sich der Anwender nach dem Abheben nicht in Gleichgewichtslage befindet, stellen sie diese anhand der Kurbel der Gleichgewichtsregelung her.

Entfernen des StretcherSling:



1

1. Lösen Sie zunächst alle Aufhängeschlingen vom Heber und entfernen Sie diesen. Wenden Sie den Anwender zu sich hin und falten Sie den StretcherSling herunter auf die Unterlage.

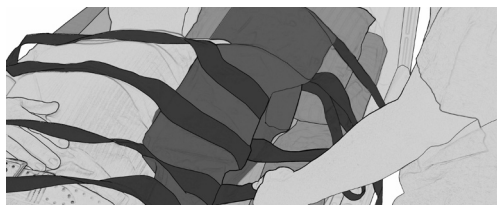

2

2. Der Stoff gleitet dann an sich selbst entlang, wenn Sie den StretcherSling nach dem Zurückwenden des Anwenders herausziehen.

Alternative Anbringung des StretcherSling:

Wenn die Situation ein Rollen des Anwenders nicht erlaubt, schieben sie zuerst zwei Ro-Medic ReadySheet unter den Anwender (von unten nach oben) und ziehen Sie daraufhin den StretcherSling zwischen den glatten Oberflächen ein.

Material:

Polyamid: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung.

Kunststoffnetz: Kann abgespritzt werden und empfiehlt sich bei Bade- und Duschsituationen.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets die neueste Version des Handbuchs besitzen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33
Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com
E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]