

Max: 300kg

WalkingVest ist eine durch den Assistenten einfach anzulegende Weste für Gehtraining, die zugleich dem Anwender ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Sie stützt den Oberkörper und den Leistenbereich durch ein Band beim Aufstehen und Gehtraining. WalkingVest aktiviert den Anwender sicher und bequem.

WalkingVest wird in mehreren Größen hergestellt und ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Funktionen des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

Die Aufstehhilfen Heber von RoMedics sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem zum Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen der Hebeweste durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblüht ist.



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung


Achten Sie besonders auf die Größe der WalkingVest.

Verweilen Sie während des Aufstehmoments beim Anwender.

Achten Sie darauf, dass das Hebezubehör den Voraussetzungen des Anwenders entspricht. Prüfen Sie, ob sämtliche Schlingen korrekt angebracht sind, bevor Sie mit dem Aufrichten beginnen.

Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

Beschreibung der RoMedic WalkingVest:

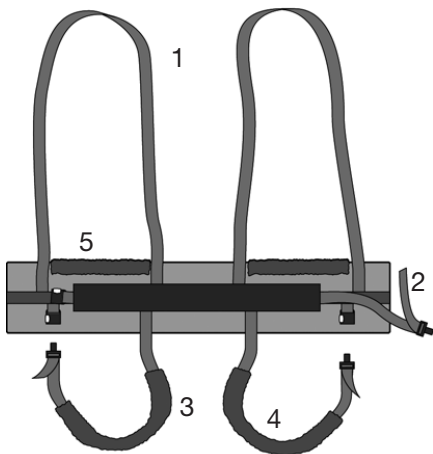


Die RoMedic WalkingVest besteht aus:

1. Hebeschlingen (grau)
2. Hüftgurt (rot)
3. Leistenband (schwarz)
4. Polsterung Leistenband
5. Polsterung Hebeweste

Hebeschlingen am Hebebügel anbringen. Hüftgurt und Leistenband sind für einfaches Anlegen mit Schnellspanner versehen. Die Leistenbänder von hinten her um die Oberschenkel legen. Sie sind gepolstert, um Druckstellen und Scheuern im Leistenbereich zu verhindern. Die Hebeweste ist zudem in Höhe der Arme gepolstert, um Druckstellen und Scheuern zu verhindern.

Anlegen der WalkingVest im Sitzen:

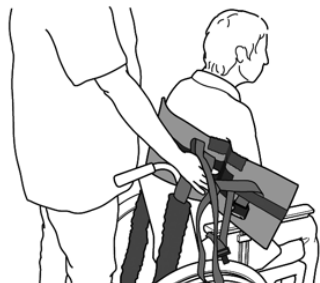


1. Die RoMedic WalkingVest mit dem Spanner nach vorn um den Oberkörper des Anwenders legen. Die Unterkante der Weste muss oberhalb der Hüfte zu liegen kommen. Die Arme bleiben außerhalb. Die Mitte der WalkingVest soll dabei entlang dem Rückgrat des Anwenders zu liegen kommen.



2. Das Hüftband anlegen und auf die Größe des Anwenders einstellen.

Anlegen der Leistenstütze im Sitzen:

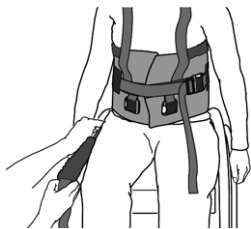

1. Nach Anlegen der Weste um den Oberkörper des Anwenders die Leistenbänder von außen her unter die Oberschenkel einführen.



2. Leistenbänder an der Vorderseite spannen.



3. Leistenbänder an die Größe des Anwenders anpassen.

Anheben auf Stehposition:



1. Bereiten Sie den Anwender auf das Aufstehen vor. Verweilen Sie während des Anhebens stets beim Anwender und achten Sie auf dessen Signale. Bei Unbehagen den Vorgang sofort abbrechen.



2. Wenn der Anwender steht, kann eine Gehhilfe verwendet werden.

Material:

Polyester: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des
Materials nicht im Wäschetrockner
trocknen.

Größen

Größe	XXS/Grau	XS/Orange	S/Rot	M/Gelb	L/Grün	XL/Lila	XXL/Weiss
Maße der Weste in cm	60	70	82	96	110	122	142
Empf. Anwendergewicht kg	15-40	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110	100-130

Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets die neueste Version des Handbuchs besitzen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33
Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com
E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]