
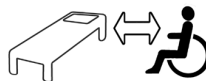


EasyBelt FlexiBelt

SystemRoMedic SystemRoMedic

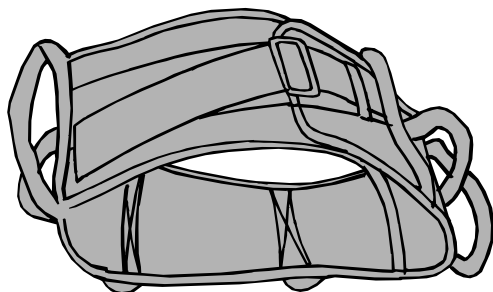

EasyBelt og FlexiBelt benyttes som støtte i ulike forflytninger. De skal ikke benyttes enkeltvis som et løftehjelpemiddel. EasyBelt har en innside av nylon, hvilket gjør den enkel å vaske og evt. desinfiseres ved behov. FlexiBelt har en myk innside som er behaglig mot huden. Begge materialene har antisklifunksjon.

EasyBelt og FlexiBelt inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukers funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Mekanisk belastning

Test spennens funksjon og håndtak, og kontroller at de tåler tung belastning (Sida 2).




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.




Funksjonstest av EasyBelt/FlexiBelt

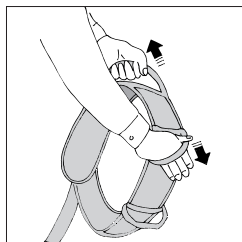

1


Dra hardt i håndtakene i ulike retninger (1).

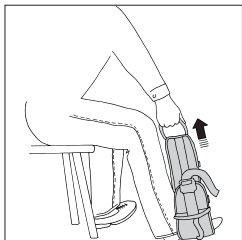

2

Lukk beltet og sett det ene beinet på det (2). Test ved å trekke skikkelig i alle håndtakene.


Plassering av EasyBelt/FlexiBelt

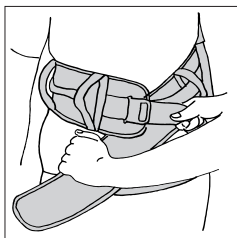

1. Plasser beltet rundt brukernes midje og så langt ned på hoften som mulig.

2. Knepp beltet og stram det til. Ved behov kan beltet etterstrammes når brukeren har kommet opp i stående stilling.

Fjerning av EasyBelt/FlexiBelt

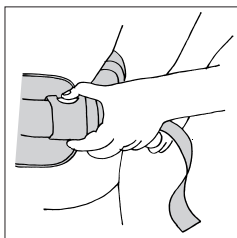

Knepp opp spennen, frigjør evt båndet først, for så å fjerne beltet helt.

Bruk av EasyBelt/FlexiBelt



1

Ved oppreising fra sittende til stående kan medhjelperen velge om han/henne vil jobbe foran brukeren eller fra siden. En stor fordel med å jobbe foran brukeren er at brukeren får en mer sikker og trygg oppreising. Husk å jobbe med beina og bruk vektoverføringsprinsippet.

Ved oppreising der to medhjelpere deltar, passer det å jobbe med kryssgrep foran brukeren (1).

I selve oppreisingen er det viktig å lene brukeren fremover for å få et naturlig bevegelsesmønster. Jobb inn mot kroppen med EasyBelt/FlexiBelt .



2

Når brukeren har kommet opp i stående, endrer medhjelperne posisjon og står nå på hver side av brukeren med kryssgrep bak brukeren. Den ledige hånden kan støtte brukeren ved å holde han /hun i hånden (2 og 3). Kryssgrepene på baksiden gir god støtte og en sunn arbeidsstilling.



3

Det går fint å arbeide to og to (3) eller alene (4) med løftebeltene siden de begge har flere vertikale og horisontale håndtak. Alt avhenger av brukers behov.



4

Materiale:

EasyBelt: Polyamid, nylon

FlexiBelt: Polyamid, polyester

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Storlek:

Storlek	XS	S	M	L	XL
Anbefalt lbs	-66	55-121	110-165	154-242	231-
Brukervekt kg	- 30	25-55	50-75	70-110	105-

6012	EasyBelt XS	75 x 12 cm
6013	EasyBelt S	105 x 12 cm
6014	EasyBelt M	120 x 12 cm
6015	EasyBelt L	135 x 12 cm
6023	FlexiBelt S	105 x 12 cm
6024	FlexiBelt M	120 x 12 cm
6025	FlexiBelt L	135 x 12 cm
6026	FlexiBelt XL	150 x 12 cm

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group