


170x59

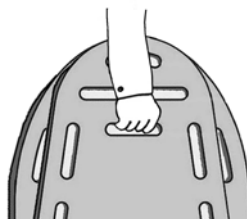

Max: 135 kg/297 lbs

EasyGlide benyttes ved liggende overflytninger mellom seng og røntgenbord/operasjonsbord/dusjvogn. EasyGlide er enkelt å transportere og lagre, siden den kan brettes sammen på midten.

EasyGlide inngår i en serie av ulike modeller av forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke løftesituasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




## Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



## Kontroll av funksjon

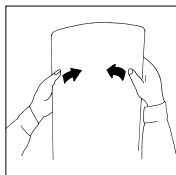


Kontroller materialstyrken i EasyGlide ved å bøye forsiktig i skiven. Skiven skal ha god spenst og føles fast. Kasser EasyGlide om materialstyrken har avtatt.

## Plassering/fjerning av EasyGlide




Vend brukeren i sideleie og før inn EasyGlide under 1/3 del av kropppen. Før fjerning, vend brukeren mot siden og dra bort EasyGlide.

## Bruk av EasyGlide

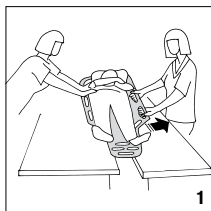

1. Jobb på begge sider, skyv og trekk i gående stilling. Avstanden mellom underlagene får ikke være større enn 20 cm.

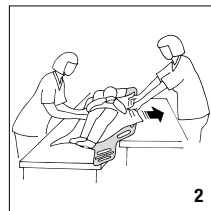

2. EasyGlide er ypperlig også ved mindre høydeforskjeller mellom underlagene. EasyGlide skal alltid tas bort under røntgen.

## Materiale:

Polyethen

## Vedlikehold:

EasyGlide rengjøres med vann og desinfiseringsmiddel.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utproving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group