


152x53

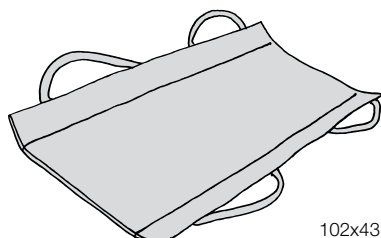

102x43

112x53



Max: 150 kg/330 lbs

FlexiMove benyttes i forflytningssituasjoner som vending i sengen, høyere opp i sengen, seng til seng, seng til dusjvogn samt løft fra gulv. FlexiMove er laget med fire eller seks håndtak, og benyttes ut i fra brukerens behov av støtte og antallet medhjelpere.

FlexiMove inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.




Funksjonstest av FlexiMove

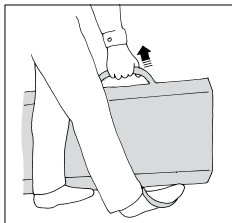


Funksjonstest FlexiMove regelmessig. Sett en fot i et av håndtakene og trekk hardt i et av håndtakene på motsatt side. Gjenta prosessen til alle håndtakene er grundig testet.

Plassering av FlexiMove

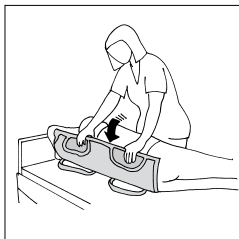


Brukeren vendes til siden og FlexiMove føres inn med håndtakene viklet inn under platen. Brukeren vendes tilbake på rygg og håndtakene dras frem.

Vending i seng

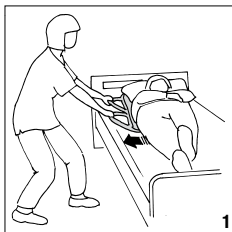


Plasser FlexiMove som beskrevet over. Benytt deretter håndtakene og trekk brukeren nærmere kanten. Jobb i gangstilling, lett bøyde knær, strake armer og rett rygg (1).

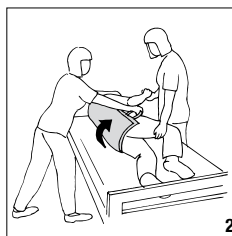

Vikle inn håndtakene og vend så brukeren til motsatt side der en annen medhjelper står som støtte. Om du arbeider alene, sett opp sengegrinden. Gjennomfør vendingen ved å benytte beina og skyv så brukeren fra deg (2).

Høyere opp i sengen

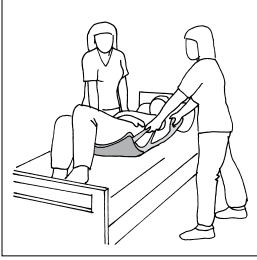

Jobb på begge sider av sengen. Om brukeren kan bøya beina og sparke i fra, forenkler dette forflytningen. Jobb i gangstilling, rett rygg og strake armer. Vær samspilte under forflytningen.


Seng til seng/seng til dusjvogn



Jobb to og to eller flere, avhengig av brukerens behov. Plasser sengene så nære hverandre som mulig. Trekk først over føttene og hjelp til å trekke og skyve resten av brukerens kropp over til sengen/dusjvognen.

Løft fra gulv

Obs! Løft alltid i med en mekanisk løfter der dette er mulig. Ved manuelle løft vær forsiktig. Løft aldri mer enn hva som er passende/hensiktsmessig.

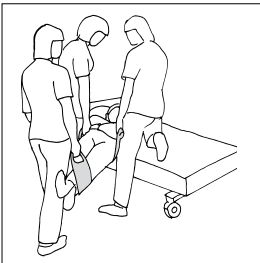

Jobb to og to eller flere, avhengig av brukerens behov. Planlegg forflytningen slik den blir så kort som mulig.

Materiale:

Polyamid, nylon

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Før vask: ta ut platen og vatteringen. Disse rengjøres med desinfiseringsvæske. Futteralet vaskes i henhold til vaskesymbolene på tøymerkingen.

Storlek:

4011	102 x 43
4012	112 x 53
4016	152 x 53

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group