

FootStool benyttes for å heve knærnes posisjon og dermed skape en sikrere og enklere overflytning i sittende mellom seng og rullestol. Produktet gir også god støtte under føttene ved toalettbesøk, eller ved en forflytning lengre bak i stolen. FootStool er produsert i et materiale med lukkede porer som gjør den lett og holde hygienisk.

FootStool inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon


Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.



Les alltid bruksanvisningen


For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

Plassering av FootStool:

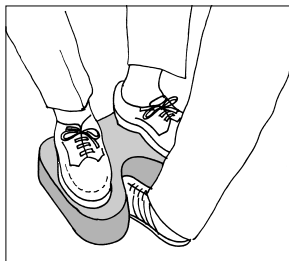


Plasser FootStool under brukerens føtter i sittende stilling på toalettet eller i rullestolen. I framkanten på FootStool finnes en utsparring slik at medhjelperens fot skal kunne plasseres så nær brukeren som mulig. I bakkant finnes en mindre utsparring for plassering nær toalett.

Bruk av FootStool:

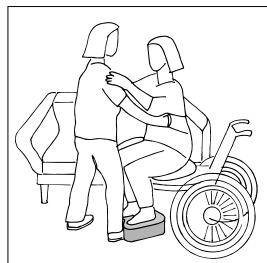

FootStool kompletterer andre hjelpe-midler som for eksempel EasyBelt/FlexiBelt, EasyGlide og SitWalk, og forenkler forflytninger mellom to enheter eller posisjonering lengre bak i stolen etc. Siden knærne heves er også lårene fri fra underlaget. Dette minsker også friksjonen og gjør forflytningen enda enklere.

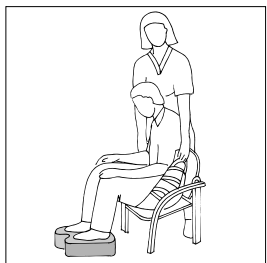

Materiale:

Polyethylen

Vedlikehold:

Rengjør med oppvaskmiddel eller desinfeksjonsvæske. Tørk av med en tøffille.

Obs: Utsett ikke produktet for harde eller skarpe trykkbelastninger. Punktbelastning kan føre til merker i materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group