


HighBackSling

SystemRoMedic

Manual

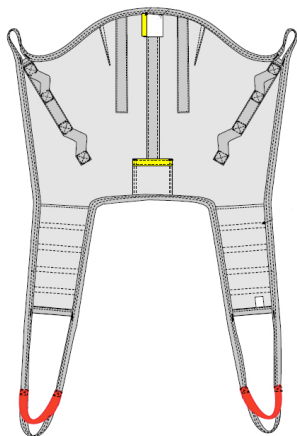

Maks belastning: 300 kg



HighBackSling er en løftesele som er enkel for pleieren å applisere og gir brukeren trygghetsfølelse ved forflytning. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til over hodet. RoMedic HighBackSling er utformet for å gi mye støtte i løftesituasjoner og egner seg svært godt i løft fra liggende stilling fra f. eks. gulv.

HighBackSling finnes i flere materialvalg. Valget av modell og materiale avgjøres av brukernes egne funksjoner samt hvilken/hvilke typer løftesituasjoner den benyttes i.

RoMedics løfteseler og heiser inngår i SystemRoMedic, en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger; overflytning, posisjonering, støtte og løft.

Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og fritt for skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå risiko for utglidning eller andre ubehag ved å velge riktig størrelse på løfteselen. For stor løftesele gir høy risiko for utglidning.

La ikke brukeren være alene under løftemomentet.


Fest først selens ryggfester, deretter fester man benfestene.

Bruk godkjent løftebøyle for økt sikkerhet.

Plassering av løftesele når brukeren sitter i rullestol/stol eller seng:



1

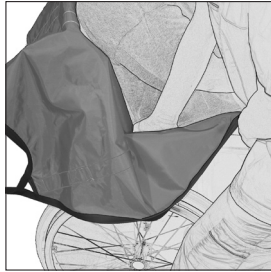


2

1. Hold løfteselen i den ene hånden og plasser den andre hånden i lommen på den nedre kanten på selen. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Før løfteselen ned bak brukers rygg gjennom å la den gli ned langs rullestols rygg/seng. Det er optimalt om den kommer helt ned til halebenet på brukeren. Løfteselens midtlinje skal følge brukers rygrad.

2. Vær nøye med å få løfteselen godt rundt setet på brukeren. Dette gjøres enklest ved å benytte rommet ved bakre hjørne på rullestolsetet.



3

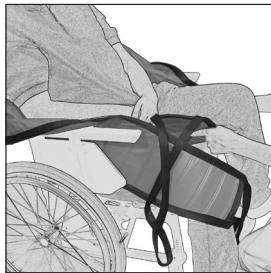

4

3. Jobb frem stroppene langs lårenes utside. Sitt gjerne foran brukeren og trekk i den nedre kanten på benstroppene slik at løfteselen glir på plass rundt setet på brukeren. Sett ditt kne mot brukers kne slik at man unngår at brukeren glir for langt frem i rullestolen.

4. Etter at du har kontrollert at begge benstroppene er like lange på begge sider, kan du plassere dem under brukers lår. Det er vanlig å krysse begge stroppene før de festes i løftebøylen.

Fjerning av løfteselen når brukeren sitter:



1



2


1. Vend brukeren mot deg og fold selen inn under brukeren, slik at stoffet glir mot seg selv og du lett kan trekke ut løfteselen under brukeren.

2. Trekk løfteselen opp bak brukers rygg.

Plassering av løftesele når brukeren ligger i seng, på benk eller gulv:




1

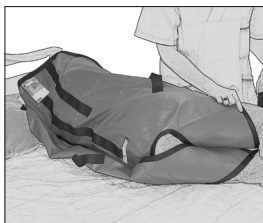

2

1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfte-selen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midtmarkeringene følger ryggraden. Løfteselens øvre kant skal være i skulderhøyde og den nedre kanten dekker halebenet. Plasser løfteselen så langt inn under brukeren som overhode mulig. Sørg for at rygg-delen dyttes godt inn under kroppen, slik at du får tak i den på den andre siden etter at du har vendt brukeren tilbake på rygg.

2. For lettere håndtering og færre momenter kan du i sideleie krølle ryggdelen mot brukerens rygg og samtidig plassere benstroppene under brukerens ben. Da er det enklere å trekke frem selene når brukeren ligger på løfteselen.

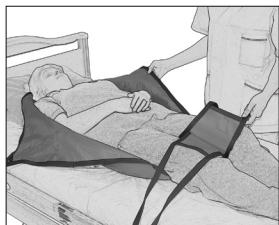

3



4

3. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem ryggdelen og benstroppene.

4. Det er vanlig å krysse benstøttene før de festes på løftebøylen. Hev løftebøylen forsiktig og stopp opp for å kontrollere at alt fungerer.

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger:



1



2

1. Vend brukeren mot deg og fold selen inn under brukeren, slik at stoffet glir mot seg selv og du lett kan trekke ut løfteselen under brukeren.

2. Trekk ut løfteselen under brukeren.

Alternative bruksområder for løfteselens benstropper:



1. Det er vanlig å krysse begge benstroppene før de festes i løftebøylen.
2. Ved behov kan benstroppene krysses under begge bena.
3. Man kan også velge ikke å krysse benstroppene, men vær da på vakt for høy risiko for utglidning av løfteselen.

Materiale:

- Polyamid:** Slitesterkt materiale med lite friksjon.
Polyesternetett: Luftig materiale som ved behov kan bli værende under brukeren.
Plastret nett: Kan desinfiseres med sprit og anbefales til bruk ved bading eller dusjituasjoner.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punkts løftesituasjoner. Uansett må man alltid sjekke og sikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukerens forutsetninger. For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs. en sele tilpasset hver bruker.

Størrelse		XXS/Grå	XS/Oran-sje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lila	XXL/Hvit
Anbefalt brukervekt	lbs	22-55	44-77	66-121	110-198	176-243	243-253	287-441
	kg	10-25	20-35	30-55	50-90	80-110	110-160	130-200
Løfteselens høyde	inch	30	33,5	36	37	38,5	38,5	40
	cm	77	85	91	94	98	98	102

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

RoMedic AB
 Box 640
 SE-175 27 Järfälla
 SWEDEN
 Tel: +46 (0)8-594 773 33
 Faks: +46 (0)8-594 773 44
 E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Handicare AS
 Øreveien 37
 Postboks 163
 1501 Moss
 Tel: 03250
 Faks: 85 02 88 22
 E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic[®]
 A company in the Handicare Group