
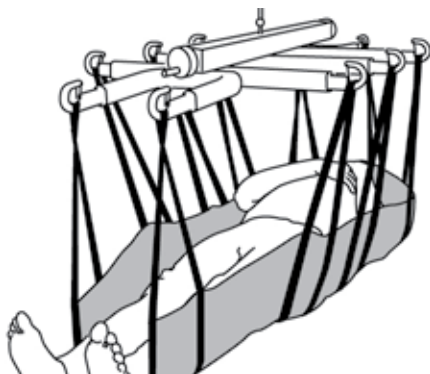


StretcherBar

SystemRoMedic

Manual

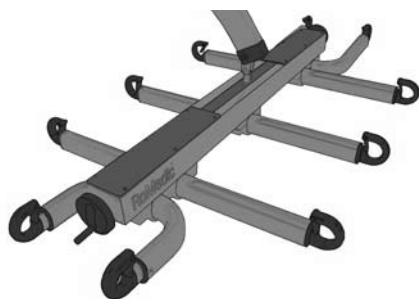

Maks belastning: 300 kg



StretcherBar er en spesielt utformet løftebøyle som sammen med løfteselen StretcherSling benyttes ved horisontale løft. Den har ti opphengspunkter, fem på hver side av brukeren, hvilket gir brukeren en jevnt fordelt støtte under hele kroppen. RoMedic StretcherBar og StretcherSling er utformet for å tilgodese behov for å forflytte brukere i liggende stilling.

StretcherBar og StretcherSling inngår i en serie av ulike modeller av løftebøyer og løfteseler.

Valget av modell og materiale bestemmes av brukerens funksjoner og til hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics løfteseler og løftere inngår i SystemRoMedic, et helhetssyn om forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller. Kontroller at materialet er helt fritt for skader.



Les alltid bruksanvisningen


Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

La aldri brukeren være alene under løftemomentet.

Kontroller at samtlige løftebånd er korrekt plassert på StretcherBar.

Kontroller at festeanordningen på løftebøylen og at avkrokningsvernets funksjon er korrekt montert. Juster via likevektskontrollen for å oppnå likevekt ved behov.


Produktbeskrivelse av StretcherSling og StretcherBar

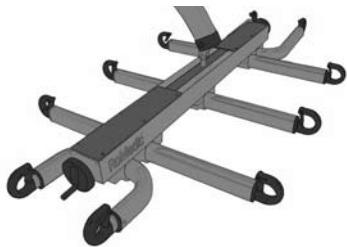


StretcherBar er produsert i aluminium og utformet med en midtdel som har innebygd likevektskontroll/ regulering. Den har også fem aluminiumsprofiler med løftekroker i hver ende.

StretcherBar kombineres med mobil eller stasjonær løfter godkjent av RoMedic.


StretcherSling (Varenummer: 46502007) er spesielt utformet til StretcherBar og ingen andre kombinasjoner anbefales.

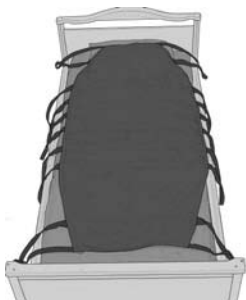

StretcherSling er laget i ett stykke (177 cm langt), har fem løftebånd som er gjennomgående under brukeren og gjør at vekten fordeles på ti løftepunkter.

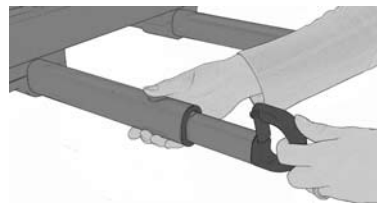

Løftekrokene er utstyrt med avkrokningsvern. Alle løftearmene kan ved behov reguleres etter brukerens bredde og trekkes enkelt ut før man starter løftet.

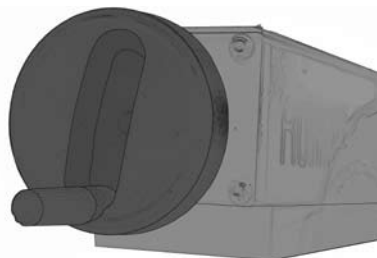

Den midtre delen på StretcherBar inneholder en innebygd likevektskontroll. Denne reguleres enkelt med en hendel på hver side som man roterer for å gi ønsket likevekt.


Plassering og fjerning av StretcherSling skal bare skje når brukeren ligger:




- 1
1. Vend brukeren mot deg. Plasser Stretcher-Sling med merkelappen mot underlaget og midtlinjen langs ryggraden på brukeren. Den øvre kanten av StretcherSling skal gi støtte til hodet. Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som mulig. Før så løftebåndene under brukeren slik at du når dem når du vender brukeren tilbake på StretcherSling.



- 2
2. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem selen på den andre siden ved hjelp av løftebåndene.

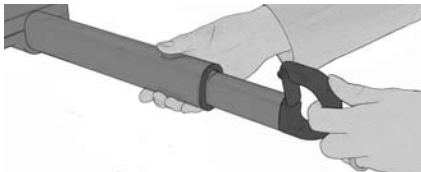

- 3
3. Ved behov: Juster bredden på StretcherBar utfra brukerens bredde ved å trekke ut løftekrokene. Hekt løftebåndene på bøylen.

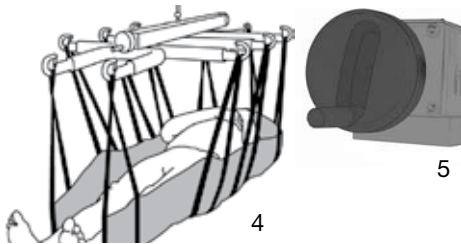

- 4
4. Kjør løfteren opp til samtlige løftebånd er stramme. Stopp opp for å kontrollere at alt er i orden før du fortsetter å løfte brukeren helt fra underlaget.
- 5
5. Hvis det ikke er likevekt når brukeren løftes fra underlaget, kan du regulere dette ved å skru på likevektskontrollen.

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger:



- 1
1. Frigjør samtlige løftebåndene fra løfteren og sett den til side. Vend brukeren mot deg og fold StretcherSling mot underlaget slik at den glir mot seg selv.



- 2
2. Tøyet glir lett mot sin egen overflate når du drar ut StretcherSling etter at du har vendt brukeren tilbake.

Maksvekt

Det kan forekomme ulike tillatte maksvekter for produktene i den sammensatte løfteenheten: løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelle andre løftetilbehør.

Det er alltid den laveste tillatte maksvekten på den respektive enheten i det sammensatte produktet som bestemmer.

Kontroller alltid tillatt maksvekt på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt leverandøren for spørsmål.

Rengjøring

Ved behov, rengjør løfteren med varmt vann eller sprit, og sjekk at hjulene er uten hår og smuss. Benytt ikke rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor. Dette kan skade aluminiumet og polyamidmaterialene.

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic®