

AntiSlip benyttes som antiskli under føttene i ulike forflytningssituasjoner som for eksempel høyere opp i sengen eller ved oppreising. AntiSlip er produsert i et materiale med lukkede porer som gjør den lett og holde hygienisk.

AntiSlip inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.




Kontroll av funksjon:

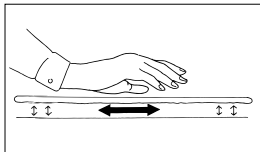



Kontroller at antiskliffunksjonen i AntiSlips fungerer mot det gitte underlaget.

Plassering av AntiSlip

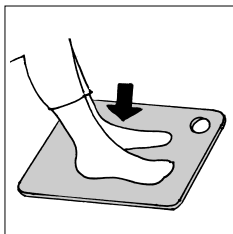

AntiSlip plasseres under brukerens føtter på gulvet eller i sengen for å få et godt feste.

Bruk av AntiSlip

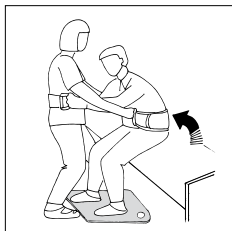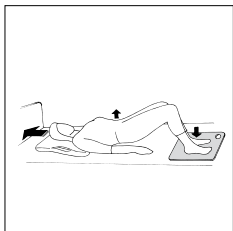

1. Gir et godt feste under føttene i seng-en ved bekenløft eller ved forflytninger høyere opp i sengen. Kombiner gjerne med funksjonsreducerende/friksjonsreducerende hjelpemiddel under skuldrene.

2. AntiSlip kan benyttes under føt-tene for et god feste ved oppreisning eller forflytning mellom ulike enheter som for eksempel seng til rullestol/stol. Bruk også gjerne EasyBelt/FlexiBelt.

Vedlikehold:

Rengjør med oppvaskmiddel eller desinfeksjonsvæske. Tørk av med en tøyfille.

Obs: Utsett ikke produktet for harde eller skarpe trykkbelastninger. Punktbelastning kan føre til merker i materialet.

Materiale:

Polyetylen

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utproving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group