

ComfortCushion er en solid pute i antisklimeriale som forhindrer nedglidning i sengen. Den plasseres under brukerens knær ved sittende stilling i sengen. Samtidig som man forhindrer nedglidning, motvirkes også strekkleie på baksiden av låret som ellers kan oppstå ved rette bein. ComfortCushion er produsert i et materiale med lukkede porer som gjør den lett og holde hygienisk.

ComfortCushion inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon



Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.



Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

Plassering av ComfortCushion:

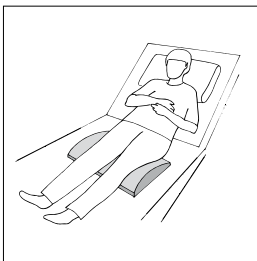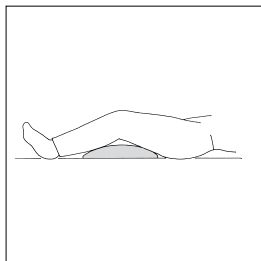

Plasseres under knærne ved liggende stilling i seng, og forhindrer nedglidning når man hever sengens ryggdel.

Ved heving av sengens hodedel, vær oppmerksom på at trykket mot skuldrene reduseres ved å lene brukeren fremover eller ved å plassere et friksjonsreducerende hjelpemiddel bak skuldrene.

Obs! Tenk på risikoen for kontrakturer: La ikke puten ligge for lenge under knærne.

Materiale:

Polyethylen

Vedlikehold:

Rengjør med oppvaskmiddel eller desinfeksjonsvæske. Tørk av med en tøffille.

Obs: Utsett ikke produktet for harde eller skarpe trykkbelastninger. Punktbelastning kan føre til merker i materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group