



Max: 135 kg /297 lbs

EasyGlide benyttes i sittende overflytninger mellom rullestol og seng, toalett eller bilsete. EasyGlide lages i ulike størrelser for å bistå i de fleste forflytningsbehov. Den minste modellen benyttes ofte av aktive brukere som utfører forflytningene helt på egen hand.

EasyGlide inngår i en serie av ulike modeller av forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke løftesituasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.




Kontroll av funksjon

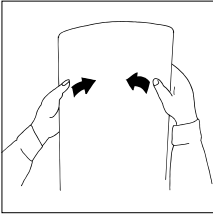


Kontroller materialstyrken i EasyGlide ved å bøye forsiktig i skiven. Skiven skal ha god spenst og føles fast. Kasser EasyGlide om materialstyrken har avtatt.

Maksimumsvekt

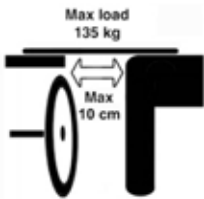

60x33, 60x25, 45x20

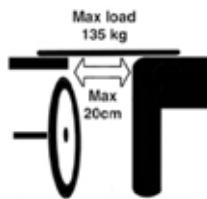

75x33

Maksimumsvekten på 135 kg gjelder med maksimumsavstand på 10 cm eller 20 cm mellom de to enhetene brukeren flyttes i mellom. 10 cm gjelder for EasyGlide 60x33, 60x25 og 45x20. 20 cm gjelder for EasyGlide 75x33.

Plassering/fjerning av EasyGlide



Plasser rullestolen så den står skrått i mot sengekanten og så nær som mulig. Ta bort den armlenet som er nærmest sengen. Fjern også eventuelle beinstøtter. Plasser EasyGlide som en bro mellom sengen og rullestolen. Om det er en EasyGlide der den ene langsiden kan bøyes, skal denne plasseres mot rullestolshjulet.

For å plassere EasyGlide under brukeren, kan brukeren lenes litt i motsatt retning.



Når forflytningen er ferdig kan EasyGlide fjernes ved å bøye den oppover, se bilde.

Bruk av EasyGlide



Hvis brukeren er aktiv kan han/henne enkelt forflytte seg selv ved hjelp av EasyGlide. Ta tak i armlenet og len deg over mot rullestolen. Det er viktig å huske at man må lene seg en siste gang i retningen sengen når forflytningen er ferdig. Dette for å gli mot midten og lengst bak i stolen.



Hvis brukeren har behov for støtte og hjelp under forflytningen, bør EasyGlide kompletteres med et EasyBelt/FlexiBelt på brukeren.



Medhjelpere kan enten jobbe foran eller bak brukeren.



EasyGlide egner seg også godt ved forflytninger inn og ut av bil.

Materiale:

Polyethen

Vedlikehold:

EasyGlide rengjøres med vann og desinfiseringsmiddel.

Storlekar:

5020 60 x 33

5050 75 x 33

5060 60 x 25

5070 45 x 20

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group