





190 x 60 cm

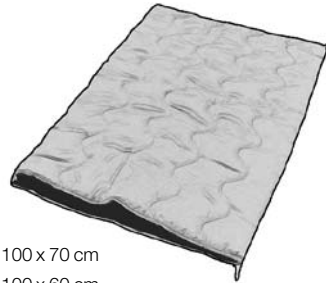

100 x 70 cm  
100 x 60 cm

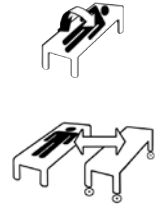

EasySlide benyttes ved vendinger i seng samt ved overflytninger mellom seng og brits/dusjvogn. EasySlide er laget som en sylinderformet vattert matte med et friksjonsreducerende materiale på innsiden.

EasySlide inngår i en serie av ulike modeller av forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke løftesituasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.





## Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



## Test av friksjon

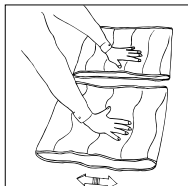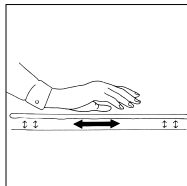

Test EasySlides friksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den glir. Hvis mulighet, sammenlign med en ny EasySlide.

## Plassering av EasySlide



1



2

Len brukeren til siden, gjerne ved hjelp av et stikkklaken. Plasser glidematten under brukeren (1). Fjern glidematten når forflytningen er utført (2).

## Observer



Max 5 cm

1



2

Ved overflytning mellom seng/brits og dusjvogn skal aldri avstanden være større enn 5 cm (1).

Obs!

Husk alltid å låse hjulene.

La aldri EasySlide ligge igjen under brukeren, siden risikoen for utglidning er stor (2).

## Materiale:

Polyester, microfiber, polyamid

## Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group