



140 x 90 cm



200 x 90 cm



EasySlide benyttes ved vendinger i seng. Siden denne modellen av EasySlide har låsespenne som festes i sengen, kan sengens ryggstøtte heves uten at brukeren glir nedover. EasySlide blir værende i sengen og kan ligge permanent under brukeren ved behov.

EasySlide inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



Test av friksjon

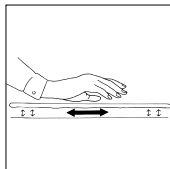


Test EasySlides friksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den glir. Hvis mulighet, sammenlign med en ny EasySlide.

Plassering av EasySlide

Glidematten plasseres med låseanordningen på oversiden mot hodegavlen. Ved forflytning til/fra seng samt når brukeren er posisjonert, plasser et laken tvers over glidematten og brett det inn under madrassen på begge sider av sengen.

Bruk

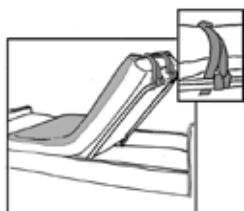

Spenn båndene før sengeryggen heves, løs opp båndene når sengeryggen senkes.



Utfør vendingen ved å trekke i lakenet som ligger oppå EasySlide. Når vendingen er ferdig brettes lakenet inn på begge sidene.

Observer



Vær oppmerksom på utglidningsrisiko. Sett alltid opp sengegrindene hvis brukeren er alene.

Materiale:

Polyester, microfiber, polyamid

Storlek

1420 140 x 90

1470 200 x 90

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group