



MoveMaster benyttes i overflytninger mellom seng og rullestol/mobil toalettstol. MoveMaster er laget som en åpen glidematte med tre håndtak, hvorav et er lengre enn de to andre. De ulike håndtakene samt den åpne utformingen, gir medhjelperen mulighet for alternative arbeidsstillinger.

MoveMaster inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid bruksanvisningen


For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



Kontroll av funksjon



1

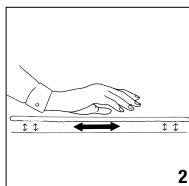

2

Kontroller styrke og sommer i MoveMaster ved å dra i håndtakene (1).

Test MoveMasters friksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den glir (2). Hvis mulighet, sammenlign med en ny MoveMaster.

Bruk av MoveMaster



1



2

1. MoveMaster er et friksjonsreducerende hjelpemiddel som med fordel kan benyttes sammen med en EasyGlide for å forenkle sittende overflytninger. MoveMaster brettes dobbelt og glider mot seg selv, og tar meg seg brukeren over underlaget.

2, 3. Plasser MoveMaster under brukeren med enten hånden eller ved hjelp av EasyGlide. EasyGlide kan fungere som en bro mellom sengen/rullestolen/dusjstolen. Len brukeren litt i motsatt retning ved plassering. I overflytningen lenes brukeren mot forflytningsretningen. Dette for å minske friksjonsflaten under sitteknutene og medfører at det blir lettere.



3



4

4. Len brukeren til motsatt side ved fjerning. Hold i den øvre delen av MoveMaster og trekk så i den nedre delen i motsatt retning.

Materiale:

Polyamid, polyether

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group