



Max: 150 kg/330 lbs

OneWaySlide benyttes for posisjonering lengre bak i stolen/rullestolen. OneWaySlide er laget slik at den glider lett bakover, men ikke framover. Produktet blir værende igjen under brukeren.

OneWaySlide inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



Kontroll av funksjon

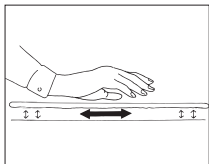

Test OneWaySlides friksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den glir. Kontroller også at den bremses i motsatt retning. Hvis mulighet, sammenlign med en ny OneWaySlide.

Plassering av OneWaySlide



Forsøk å legg OneWaySlide sikkert på stolputen. Et stritt materiale på stolputen gir best effekt.

Plasser OneWaySlide i samsvar med pilens retning på etiketten. La den henge ned ca 10 cm i forkant.

OBS! Plasser OneWaySlide i samsvar med anvisningen på etiketten. Ved feilplassering er det stor risiko for utglidning.



Bruk av OneWaySlide



Om brukeren har glidd og kommet fremover i rullestolen kan brukeren, med eller uten medhjelper, lene seg frem å skyve selv seg tilbake og inn i stolen igjen.

Vær nøye med at knærne kommer like høye som hoftene. Benytt for eksempel en FootStool.

Materiale:

Polyester, polyamid, bomull

Storlekar

2069 50 x 40

2070 50 x 45

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utproving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group