
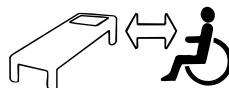


# ReTurn7500

SystemRoMedic

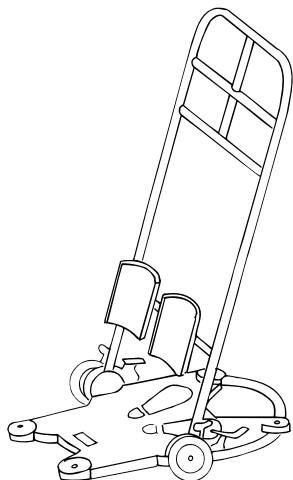

Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7500 benyttes til korte innendørs overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullstol og toalett/mobil toalettstol/rullestol eller stol/lenestol. ReTurn7100 kan også benyttes i forflytninger lengre bak i stolen. ReTurn7100 er laget slik at den er lett å manøvrere, selv også på små flater med plassbegrensning. Den er lett å montere/demontere i to deler for enkel transport og oppbevaring.

ReTurn7500 inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

Unngå ubehag ved benytte produktet korrekt.


En fagmann/autorisert serviceteknikker bør årlig kontrollere produktet samt også når behov foreligger. Service skal alltid utføres av autorisert personell.

## Spesielle bruksområder og forutsetninger



1

- ReTurn er ikke tiltenkt bruk for lengre transporter.
- Medhjelperen skal alltid gi motvekt når brukeren reiser seg opp, setter seg ned (1) samt under selve overflytningen (2).

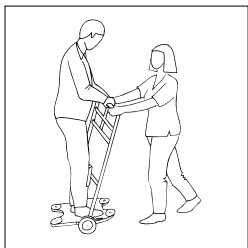


2

### Når man skal forflytte med ReTurn må brukeren kunne;

- belaste sine egne bein
- reise seg opp og kunne balansere (evt. med støtte)
- ha gripefunksjon
- kunne motta og forstå instruksjoner


## Montering

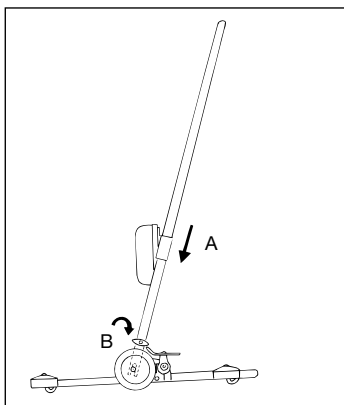

A. Håndtaksstigen/røret trykkes ned i festet på chassiset slik at høydejusteringsknappene er montert mot medhjelperens side.

B. Monter låsehendelen og dra til. Kontroller at låsehendelen er festet skikkelig før man bruker produktet.


## Transportering

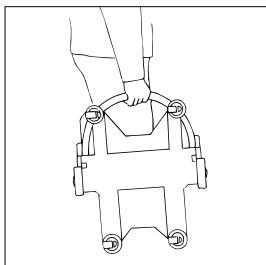


Chassiet og håndtaksstigen kan bæres hver for seg. Bær chassiset i røret som du finner i den fremste delen av produktet.

Transportering i bil samt oppbevaring forenkles siden ReTurn kan monteres/demonteres i to deler.

## Chassiet og føttenes plassering

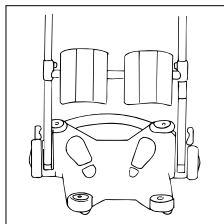


1. Føttene plasseres på hver side av chassiet. Se fotavtrykkene på bunnsplaten.

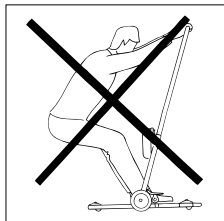


2. Brukerens tyngde skal alltid være innenfor bunnsplatearealet (hele vekten på innsiden av hjulene), d.v.s. at brukeren skal være i stående posisjon. Brukeren skal aldri ha kroppstynghden utenfor bunnsplatearealet.

## Brems

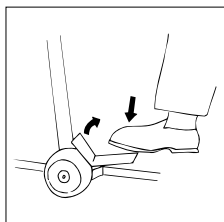


1. Det finnes en brems for hvert hjul. Tråkk på bremseplatens røde markering, og tråkk den ned i bunnen.

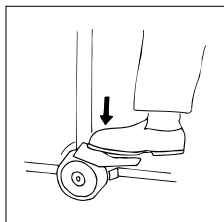

2. For å låse opp bremsen tråkker du på bremseplaten slik at går tilbake til utgangspunktet, grønn markering. Sjekk at hjulet ruller fritt.

## Leggstøtten

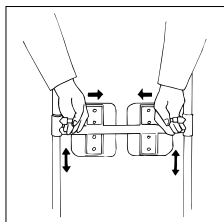

Leggstøtten justeres slik at den øvre kanten på platen ligger ca 3 cm/to fingre under kneskålens nedre kant/leddspalten. Trekk ut splintene for å løsne og justere til passende høyde. Sjekk at splintene kommer tilbake å låseposisjon. Leggstøtten kan også justeres sideveis.

## Test av ståfunksjon



Hvis det finnes risiko og usikkerhet når en bruker skal reises fra sittende til stående stilling, er ReTurn utmerket og sikker å benytte for å kontrollere ståfunksjonen.

## Trening av ståfunksjon




ReTurn benyttes for trening av ståfunksjon, samt opp og ned i sittende stilling. For å måle forandring kan man benytte en stoppeklokke eller en klokke med sekundviser.


## Forflytning




Seng til rullestol: Plasser rullestolen med litt avstand fra sengen for å få tilstrekkelige armleng/arbeidsrom. Lås hjulene på rullestolen. Plasser brukers føtter på bunnplaten. Brukeren griper, lener seg fram og reiser seg opp.

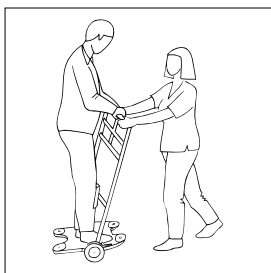

Trekk ReTurn en tanke bakover for så å styre den inn mot rullestolen.

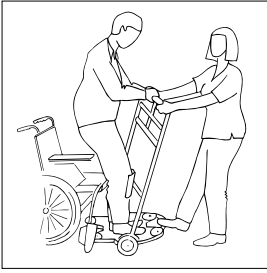

Skyv inn tilstrekkelig for en god plassering i rullestolen. Før brukeren setter seg ned gir medhjelperen motvekt.

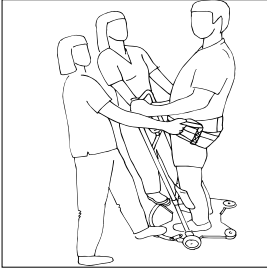

To medhjelpere med ReTurnBelt: RoMedic ReTurnBelt gir gripemuligheter og forenkler stimuleringen av brukeren når han/henne skal lene seg fremover.



En medhjelper stimulerer brukeren til å bøye seg fremover og støtter under oppreiningen. Se manualen for ReTurnBelt.



Til toalettstol/dusjstol: I forflytninger til toalettstol gi plass for medhjelperen slik at man kan assistere brukeren med bukser. Utsparingen i bakkanten på bunnplaten gjør at brukeren kommer tilstrekkelig nær toalettstolen og får en god sitteposisjon.


## Lengre bak i stol

Hvis brukeren har glid fremover i rullestolen kan ReTurn benyttes til å hjelpe brukeren lengre bak i stolen.

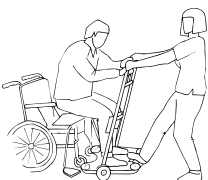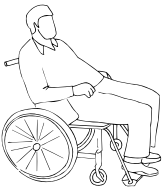

Ta bort beinstøttene på rullestolen og kjør ReTurn inn mot rullestolen. Brukeren plasserer så føttene på fotplaten, tar grep, lener seg frem og letter fra sitsen. Medhjelperen gir motvekt. Skyv brukeren lengre bak i stolen når han/hun har lettet fra sitsen.

## Teknisk spesifikasjon

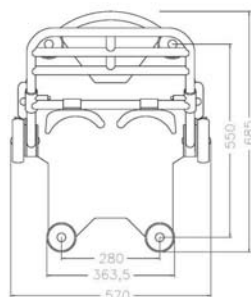

Art.nr 7500 Komplette ReTurn (5 deler)  
7201 Chassie  
7205 Stolpe inkl leggstøtte

SWL, Maksimumsvekt: 150 kg (statisk belastning)

Totalvekt: 16,5 kg

SE Patent nr: 0300528-7

## Vedlikehold

- Benytt en myk tøyfille og milde rengjøringsmidler som oppvaskmiddel eller bilsjampo når du vasker ReTurn. Benytt aldri harde redskaper når du rengjør bunnsplaten.
- Benytt aldri løsemidler.
- Ved behov for desinfisering kan 70 % alkohol benyttes.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group