
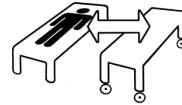
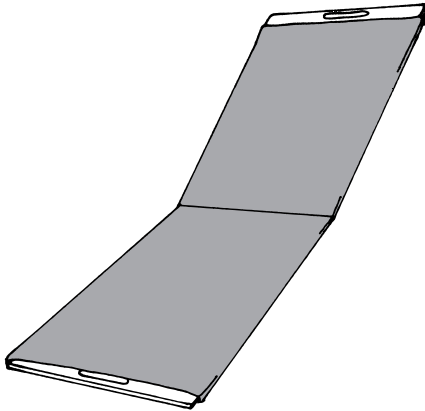



RollerSlide

SystemRoMedic

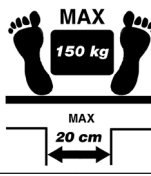

 <p>MAX 150 kg</p> <p>MAX 20 cm</p>	 <p>MAX 135 kg</p> <p>MAX 15 cm</p>
Art. no. 9145 9148 9155 9158	Art. no. 9120 9110

RollerSlide benyttes først og fremst ved overflytninger i liggende stilling mellom seng og røntgenbord/operasjonsbord/dusjvogn. RollerSlide finnes i tre modeller (RollerSlide, RollerSlide Flexi og RollerSlide Light) samt i to ulike størrelser; en kortvariant som dekker halve kroppen og en lengre variant som dekker hela kroppen. Den lengre varianten kan brettes på midten for enkel transportering samt halvsittende overflytninger.

RollerSlide inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.




Kontroll av funksjon

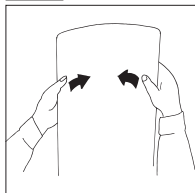



Kontroller materialstyrken i RollerSlide ved å bøye forsiktig i skiven. Skiven skal ha god spenst og føles fast. Kasser RollerSlide om materialstyrken har avtatt.

Plassering/fjerning av RollerSlide

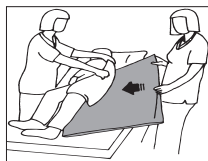

Vend brukeren i sideleie ved hjelp av lakenet, og skyv inn RollerSlide under 1/3 del av kroppen. Når RollerSlide skal fjernes lenes brukeren mot siden. Trekke så ut RollerSlide

Bruk av RollerSlide

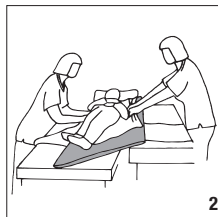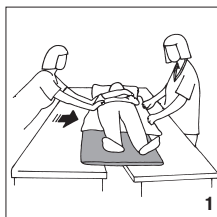

1. Jobb på begge sider, skyv og trekk i gangstilling. Avstanden mellom underlagene får ikke være større enn 20 cm.

2. RollerSlide er ypperlig også ved mindre høydeforskjeller mellom underlagene. RollerSlide skal alltid tas bort under røntgen, men RollerSlide Light kan derimot bli værende under brukeren ved røntgen.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



RollerSlide rengjøres med desinfiseringsvæske. Glidetrekket kan vaskes i maskin. Tørketrommel kan benyttes ved lave temperaturer.

Materiale:

Polyamid, polyether

Art.no.	Størrelse	Modell	Maksvekt	Sliding cover	Disposable cover
9120	175 x 50	Light	135 kg	9136	9138
9110	85 x 50	Light	135 kg	9156	9168
9145	175 x 50		150 kg	9136	9138
9155	85 x 50		150 kg	9156	9168
9148	175 x 50	Flexi	150 kg	9136	9138
9158	85 x 50	Flexi	150 kg	9156	9168

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.romedic.com

RoMedic AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group