

Max: 200kg/440 lbs

TopSheet 1520 og 1510 er to varianter av inkontinensslaken som gir støtte i sideleie i kombinasjon med en mobil eller stasjonær løfter. TopSheet består av to deler som sitter sammen ved hjelp av borrelås for enkelt å kunne splittes ved behov. Det finnes to løftepunkter, en på hver side. TopSheet 1510 dekker hele sengen og er laget i et friksjonsreducerende materiale på undersiden som gjør at den kan plasseres direkte på madrassstrekket eller på WendyLett (uten WendyLett2Way eller 4Way). TopSheet 1520 plasseres oppå TurnSheet 1580, 1590 eller WendyLett4Way for å minske friksjonen vunder vendingsmomentet.

TopSheet inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

La aldri brukeren være alene under posisjoneringsmomentet.

Kontroller at løftehempene er korrekt montert på løftebøylen.

Kontroller at festeanordningen på løftebøylen er korrekt montert.

Plassering av TopSheet:




TopSheet 1520 plasseres oppå TurnSheet 1580, 1590 eller WendyLett4Way for å minske friksjonen under vendingsmomentet. TopSheet 1510 som har et friksjonsreducerende materiale på undersiden, kan plasseres direkte på madrassstrekket eller på WendyLett.

Les manualen for det produktet du har valgt som underlag.

TopSheet 1520 og 1510 er laget med to tøyestykker i inkontinensmateriale som sitter sammen ved hjelp av en borrelås.

TopSheet 1520 er 140 cm langt og 140 cm bredt.

TopSheet 1510 er 200 cm langt og 160 cm bredt.

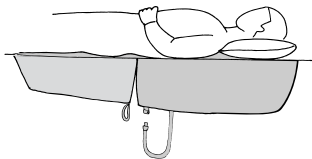


Plasser brukeren slik at hoften ligger på TopSheets underdel. Dette forenkler når den skal fjernes når man for eksempel skal bytte den ut eller komme til for rengjøring og vask.


Observer:



For høy sikkerhet benytt alltid sengegrind eller at medhjelperen står på den siden som brukeren vendes mot. La aldri brukeren være alene uten tilsyn.

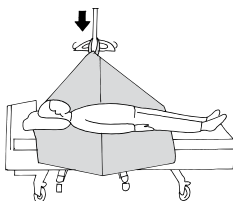


Når man benytter en mobilløfter skal løftebøylen plasseres loddrett over løftehempene.

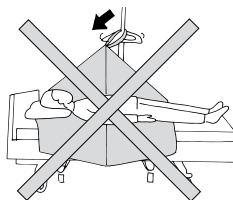

Om løfteren drar skjevt under løftet kan dette medføre risiko for velt. Sjekk at løfteren kan forflyttes i sideleie under sengen.

Vending av brukere med TopSheet:

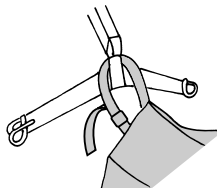

TopSheet monteres på løftebøylen på en mobil eller stasjonær løfter.



For økt sikkerhet bør det være en medhjelper eller sengegrind ved siden av sengen.


Start vendingen ved å heve løftebøylen. Medhjelperen som har best oppsyn over brukeren manøvrerer løfteren.

Vend til ønsket leie.



For at brukeren skal havne midt i sengen, justerer man manuelt ved å føre brukeren mot sentrum av sengen under vendingen.

Vending og intimhygiene:

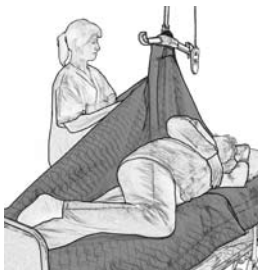

Når brukeren er lagt i ønsket leie kan borrelåsbåndene løsnes bak brukeren.



Siden TopSheet nå gir brukeren støtte bak ryggen, kan intimhygien utføres uten belastning for medhjelperen.


Bytte av underdel på TopSheet:

Vend brukeren i sideleie (se vending av brukeren med TopSheet). Løsne borrelåsen på den delen som brukeren ligger på og brett det inn så mye som mulig under brukeren. Ta en ny underdel og fest den etter borrelåskanten og brett også denne så mye som mulig under brukeren.

Vend tilbake brukeren i ryggeleie og bytt side med løfteren og gjør en vending i motsatt retning.

Fjern den underdelen som skal byttes ut, trekk frem og fest borrelåskanten til den underdelen som skal benyttes.

Funksjonskontroll

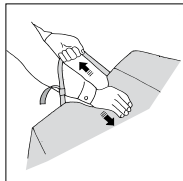

Test regelmessig spennens funksjon ved å belaste den og kontroller at det tåler kraftig belastning.

Materiale:

Polyester, polyamid

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Storlek:

1510 200 x 160

1520 140 x 140

Tilbehør

1509 140 x 160 (Nedre del til 1510)

1519 80 x 140 (Nedre del til 1520)

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group