



210x150  
140x200



Max.: 200 kg/440 lbs

TurnSheet res i sengen og har friksjonsreducerende egenskaper, og forenkler vendinger i sengen og posisjonering høyere opp i sengen for både brukere og medhjelpere. TurnSheet består av to deler, et madrassstrekk og et vendeteppe. Madrassstrekket legges rundt sengemadrassen og vendeteppet legges ovenpå. Madrassstrekket består både av et glidmateriale i midten og et bremsemateriale på sidene. TurnSheet med 140 cm har to glideluker og modellen med 200 cm har tre glideluker.

TurnSheet inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.





## Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



## Kontroll av funksjon

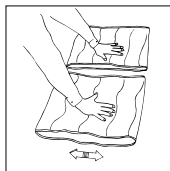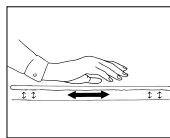

Test TurnSheets glidefunksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den glir. Hvis mulighet, sammenlign med et nytt produkt.

Test bremsematerialet på samme måte. Kontroller at overflaten er ru og at den bremser som den skal.


## Observer



Observer risiko for utglidning. Velg en madrass som er bred nok, slik at det finnes nok plass på kantene til den bremsende delen på madrassstrekket.



La aldri brukeren være alene uten å sette opp sengegrindene.

## Placering

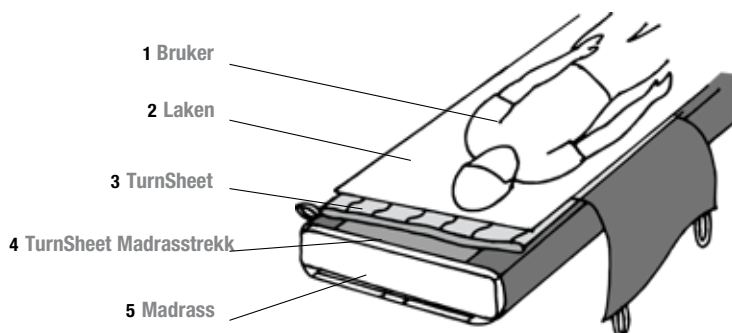

TurnSheet plasseres og res i sengen i den rekkefølgen som vises over. Madrassstrekket festes enkelt rundt madrassen med borrelåsbåndene. Vendeteppet plasseres oppå så glidematerialene ligger mot hverandre.



## Vending med TurnSheet

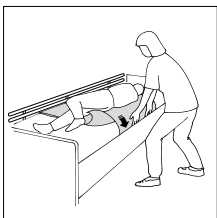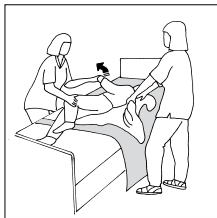


Trekk brukeren mot den ene siden. Jevn ut laken og vendeteppe og gjør underlaget plant. Trekk i lakenet og vend brukeren i ønsket posisjon.

Fest lakenet under madrassen på begge sider og sett opp sengegrindene.

## Bruk av glideluker

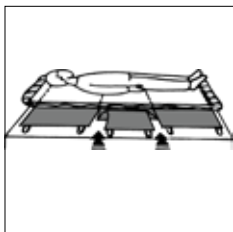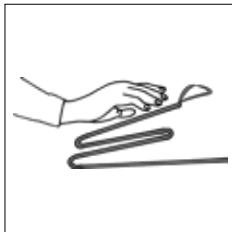

TurnSheet 140 cm har to glideluker og TurnSheet 200 cm har tre glideluker. Under glide-lukene finnes det bremsemateriale. Glidelukene kan fjernes for å posisjonere brukeren i sengen. Glideluken rundt setet kan for eksempel fjernes for å forhindre nedglidning i seng om brukeren vil sitte med hevet sengerygg i sengen.

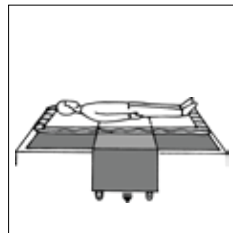

Fjerning og plassering utføres enkelt siden glidelukene vikles mot seg selv og glir inn under brukeren. Trykk ned og skyv frem. Dette forenkles ytterligere ved at en medhjelper kan bøye frem brukeren en smule.

## Materiale:

Polyamid, polyester, microfiber

## Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

## Storlek:

1580	140 x 200
1590	210 x 150
1583	Madrasstrekk till 1580
1593	Madrasstrekk till 1590

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group