


# TurnTableSoft

SvstemRoMedic

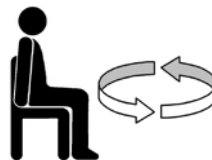

TurnTableSoft benyttes i første omgang i forflytninger inn og ut av bilsetet, men også på stoler/senger for forenkle dreininger. TurnTableSoft er laget som to runde skiver med et friksjonsreducerende materiale på innsiden som bidrar til at skivene glir mot hverandre. TurnTableSoft finnes i to ulike størrelser.

TurnTableSoft inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon


Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




## Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

## Plassering av TurnTableSoft

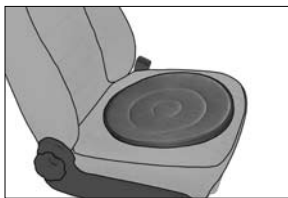

Om TurnTableSoft benyttes i bil skal den plasser midt i bilsetet.

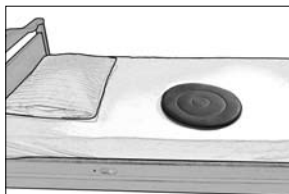

Når TurnTableSoft benyttes i seng, legges den i rett posisjon slik at brukeren blir plassert rett i sengen med hodet på puten når han/henne legger seg ned.

## Bruk av TurnTableSoft på bilsetet



Brukeren setter seg skrått inn på bilsetet med beina utenfor bilen.



Brukeren kan nå lett dreie seg rundt og løfte beina inn i bilen.



Bli sittende på TurnTableSoft under hele bilturen og benytt samme metode når brukeren skal ut av bilen.

Bruk alltid bilbeltet!

Obs! TurnTableSoft skal ikke benyttes på skai/skinninterior.

## Bruk av TurnTableSoft på sengen



Brukeren setter seg ned på TurnTableSoft.



Støtt deg mot sengen, dreier rundt og løfter samtidig opp beina i sengen.



Om brukeren kan løfte på setet, fjernes TurnTableSoft og tas frem igjen ved neste oppreisning.

## Materiale:

Polyamid, polyester

## Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

## Storlek:

5086 45 cm i diameter

5087 40 cm i diameter

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group